

BRUKSANVISNING

Instruktioner för medicinsk splint 5003000 Flexsplint

Flexsplint Medicinsk skena / dragskena

Avsedd användning

Flexsplint är ett fysiskt stöd för skadade patienter för att säkra eller stödja patienter i första hjälpen eller sjukgymnastik. Medicinsk skena bärs på patientens övre eller nedre extremiteter för att stödja, korrigera eller anpassa kroppsstrukturer för funktionell förbättring.

Avsedda användare

Den medicinska skenan är avsedd för: Militärmedicin, Prehospitalt bruk, friluftsliv,

Skidpatruller, Veterinärer och mer.

Användarinstruktioner

Forma den medicinska skenan till lämplig form för att stödja den skadade kroppsdel

Fixera ihop kroppsdel och den medicinska skenan med bandage eller tape

-Lätt och kompakt

-snabb immobilisering av en skadad lem Vattentät

- Vattenavvisande och radiolucent

-Latex fri

Rengöring och desinfektion

1. Rengör splinten med varmt tvålatten och en trasa eller mjuk borste, eller torka av med ett mildt lösningsmedel efter varje användning och torka den rumstemperatur

2. Torka av alla ytor med ett desinfektionsmedel. Följ lokala riktlinjer för rengöring, Skölj noga av starka rengöringsmedel efteråt.

Lagring Undvik hög temperatur och fukt

Hållbarhetstid Fem år



Varning

Använd under ledning av läkare eller sjuksköterska



Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd.

500 meter, Nan Sucun, Anping County, Hengshui City, Hebei-provinsen, 053600, Kina.



MedNet EC- REP GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

Distribution SWEDEN:

Ferno Norden Sweden AB

Company reg.nr.: SE 556231-7767

www.fernonorden.se

Phone: +46 (0)520-420200

Address: Kardanvägen 37, 461 38 Trollhättan – Sweden



Datum: 31 augusti 2020

Version: A / 1