



# SAM<sup>®</sup> Pelvic Sling II

SAM<sup>®</sup>  
MEDICAL


STABILISERAR BÄCKENFRAKTURER MED SÄKER OCH EFFEKTIV KRAFT

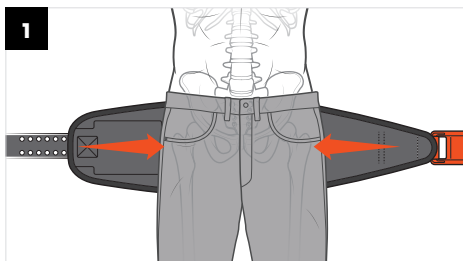

För in den **SVARTA REMMEN** genom spännet och dra den helt genom spännet.

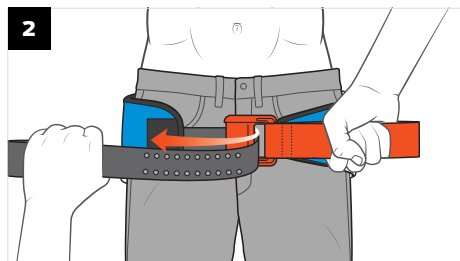

Avlägsna alla föremål från patientens fickor eller bäckenområde. Placera SAM Pelvic Sling II med den svarta sidan upp under patienten i nivå med trochanter (höfterna).

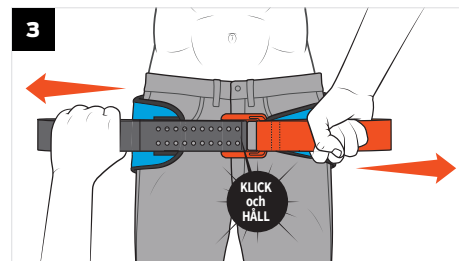

Håll i den **BRANDGULA REMMEN** (den **GRÖNA REMMEN** på PS301-OD-EN) och dra den **SVARTA REMMEN** i motsatt riktning tills du hör och känner att spännet klickar. Bibehåll spänningen och tryck omedelbart fast den SVARTA REMMEN på SAM Pelvic Sling II:s yta för att fästa den.

**OBS!** Bli inte orolig om du hör ett andra "klick" efter att SAM Pelvic Sling II har satts fast. Velcro<sup>®</sup>-fästet (kardborrefästet) säkrar slingan i läge med korrekt kraft, oavsett om spännet har hakat i eller ej.

**AVTAGNING:** Lyft den **SVARTA REMMEN** genom att dra den uppåt. Bibehåll spänningen och låt SAM Pelvic Sling II lösgöras långsamt.

**AVSEDD ANVÄNDNING:** SAM Pelvic Sling II är ett noninvasivt bäckenbälte avsett för att stabilisera bäckenfrakturer under transport till en vårdenhet för definitiv vård.

**INDIKATIONER:** SAM Pelvic Sling II är indicerad för applicering av räddningstjänst- och vårdpersonal eller annan utbildad personal, på personer som har eller misstänks ha en bäckenfraktur där blödning kan uppstå.

**KONTRAINDIKATIONER:** SAM Pelvic Sling får inte användas om anatomiska riktmärken inte kan urskiljas.

## ⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Avlägsna alla föremål från patientens fickor och kläder före applicering.
- Övervaka patientens hud med avseende på tryckskador under användningen.
- Produkten är endast avsedd för engångsbruk.
- Återanvändning av produkten kan medföra sjukdom (t.ex. infektion) eller skada (pga försämrad funktion).
- Bortskaffa den använda produkten enligt vårdenhetens rutiner för smittförande avfall.

**Meddelande till användare och/eller patienter i EU:** Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och till tillsynsmyndigheten i det medlemsland i vilket användaren och/eller patienten befinner sig.

REF	PS300-OB-EN		LITEN Höftomfång 69–114 cm   27–45 tum
REF	PS301-OB-EN		STANDARD Höftomfång 81–127 cm   32–50 tum
REF	PS302-OB-EN		STOR Höftomfång 91–137 cm   36–54 tum
REF	PS301-OD-EN		STANDARD Höftomfång 81–127 cm   32–50 tum (NSN# 6515-01-509-6866)

SAM Medical Products<sup>®</sup>  
12200 SW Tualatin Rd, Ste 200  
Tualatin, OR 97062 USA

Emergo Europe, Westervoortsejdijk 60  
6827 AT Arnhem, Nederländerna

MedEnvoy Global BV  
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123,  
2595 AM Haag, Nederländerna

sammedical.com

## MR-VILLKORLIG (MR CONDITIONAL)

Icke-klinisk testning har visat att SAM Pelvic Sling II är MR-villkorlig (MR Conditional). En patient med denna produkt kan skannas säkert i ett MR-system som uppfyller följande villkor:

- Statiskt magnetfält på högst 3 tesla.

**Viktig anmärkning:** SAM Pelvic Sling II innehåller ferromagnetiska delar och måste därför vara ordentligt fastsatt på patienten som genomgår MR-undersökning. De ferromagnetiska delarna kan påverka bildkvaliteten om de befinner sig i området av intresse för MR-undersökningen. SAM Pelvic Sling II får inte ompositioneras eller tas av från patienten i närvaro av ett starkt magnetfält, såsom magnetfältet i ett MR-system.

## KLINISK INFORMATION FÖR ANVÄNDARE:

För säker användning av denna produkt måste användaren bekanta sig med SAM Pelvic Sling II och dess bruksanvisning, öva med produkten samt iaktta vårdenhetens evidensbaserade vårdstandarder och kliniska riktlinjer, inklusive användning av personlig skyddsutrustning. Underlåtenhet att använda denna produkt på ett sätt som överensstämmer med bruksanvisningen, utbildningen och bästa kliniska praxis kan medföra allvarlig sjukdom eller personskada.

## SYMBOLFÖRKLARINGAR:

Tillverkare		Får ej återanvändas	
Satskod	LOT	CE-märke	CE
MR-villkorlig ("MR Conditional")		Auktoriserad representant i Europeiska unionen	EC/REP
Försiktighet/Varning!		Se bruksanvisningen. Elektronisk bruksanvisning finns tillgänglig på: sammedical.com/elFU	
Katalognummer	REF	Importör	
Medicinteknisk produkt	MD	Unik produktidentifiering	UDI
Liten, Standard, Stor			

©2023 SAM Medical Products<sup>®</sup> Med ensamrätt.