



Bruksanvisning


Instruktioner för att dra.

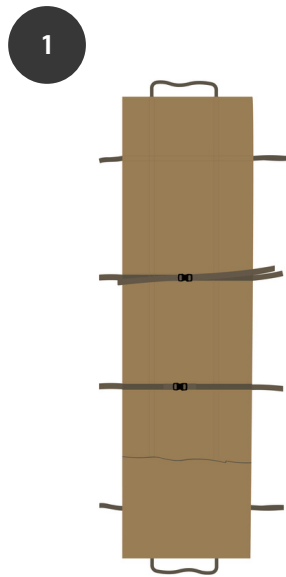


Öppna Retmexen.

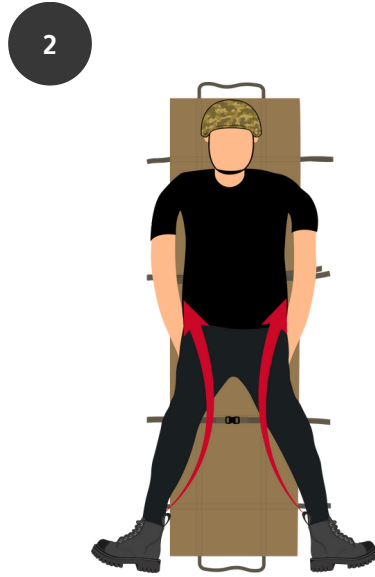


Dra fot-delen mellan patientens ben. Se till att den sitter som en "blöja".

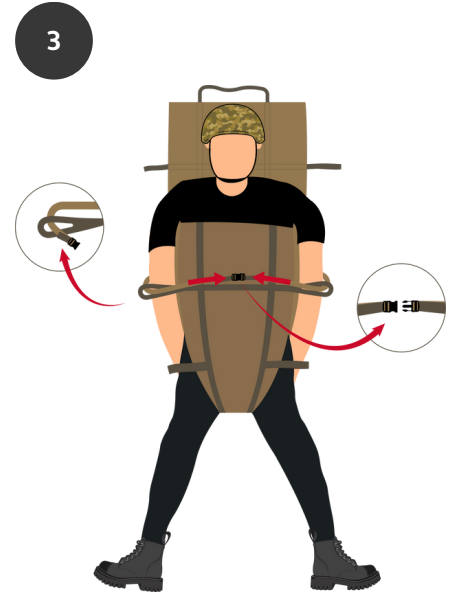

För att fixera patienten i Retmexen, dra fixeringsremmarna genom handtagen och fäst dem.

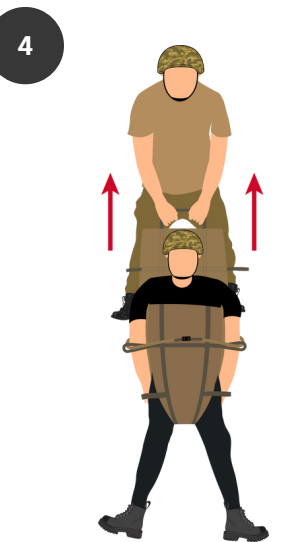

Använd nu handtaget för att dra patienten till säkerhet.

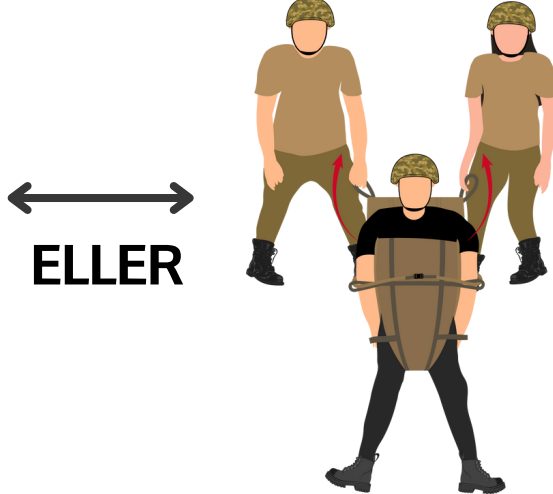

Om två personer använder Retmexen kan du använda handtagen på långsidorna för att dra.



TIPS

Se till att armarna är placerade under fixeringsremmarna.



VARNING

Friktion som uppkommer vid dragning, vassa kanter eller utskjutande delar kan skada Retmexen och därmed minska produktens effektivitet.

Instruktioner för att lyfta.

- Placera patienten i mitten av rescue sheet. Om det behövs kan du använda logroll-tekniken för att placera den under patienten.
- När Rescue Sheet hanteras av två personer ska en person stå vid fötterna och en person vid huvudet. Se till att hålla ryggen i rakt läge för att undvika skador. Böj knäna innan du lyfter.
- Idealsituationen är att Rescue Sheet hanteras av minst 3 eller 4 användare. Använd handtagen på långsidorna av Rescue Sheet för att lyfta patienten och föra till säker plats.



VARNING

Var försiktig när du lyfter. Se till att du förstår teknikerna för manuell hantering. Att lyfta tunga föremål kan leda till allvarliga skador.

