



## Dr. Marx Amputert pose

### For sikker lagring og transport av traumatisk amputerte kroppsdeler

Størrelse 1 hånd (30 x 25 cm), 2 arm (70 x 25 cm), 3 ben (110 x 40 cm)

#### Instruksjoner for bruk

1. Pakk den amputerte kroppsdelen i en steril bandasje.
2. Åpne esken, og brett ut den dobbeltveggede posen. Den indre og ytre posen er sammenkoblet i bunnen. .
3. Plasser den amputerte kroppsdelen i den **indre posen**, og trekk deretter de to **røde trådene** for å lukke ordentlig.
4. Fyll den **ytre posen** til et nivå over den amputerte delen med like deler vann og is. Trekk deretter de to **grønne snorene** for å lukke den ordentlig. Som et alternativ kan kalde kompresser også brukes til kjøling.
5. Støtt godt opp posen (fra både indre og ytre pose). Hvis posen er veldig full og tung, gi ekstra støtte til sidene og basen.
6. For langdistansetransporter, sørg for å fylle på ny is eller kalde kompresser.

**REF 2204 56 / REF 2204 57 / REF 2204 58**

LOT /  se etiketten



0481



STERILE R

MD

Medizinprodukt

**MADE  
IN  
GERMANY**

 **WERO** GmbH & Co. KG · D-65232 Taunusstein · [www.wero.de](http://www.wero.de)