



Dr. Marx replantatpose Til sikker opbevaring og transport af traumatisk amputerede kropsdele

Størrelse 1 hånd (30 x 25 cm), 2 arm (70 x 25 cm), 3 ben (110 x 40 cm)

Brugsanvisning

1. Pak den amputerede kropsdel i en steril forbindelse.
2. Åben posen med dobbelt vægge. Den indre og ydre pose er sammenbundet sikkert i bunden.
3. Anbring den amputerede kropsdel i **inderposen**, og træk derefter i de to **røde snore** for at lukke ordentligt.
4. Fyld **yderposen** til et niveau over den amputerede kropsdel med lige dele vand og is. Træk derefter i de to **grønne snore** for at lukke den sikkert. Som et alternativ kan kolde kompresser også anvendes til køling.
5. Hæng posen med dobbelt vægge op i snorene (fra både inder- og yderposen). Hvis posen er meget fuld og tung, må der gives yderligere støtte til siderne og bunden.
6. Ved lange transporter skal du sørge for at fylde op med frisk is eller kolde kompresser.

REF 2204 56 / REF 2204 57 / REF 2204 58

LOT / se etiket



STERILE R **MD**
Medizinprodukt

**MADE
IN
GERMANY**

WERO GmbH & Co. KG · D-65232 Taunusstein · www.wero.de