

OLAES® MODULÆR BANDAGE

10 cm Bandagedelnr.: **OAL-4** | 15 cm Bandagedelnr.: **OAL-6** | 10 cm

Fladt pakket delnr.: **OALFP-4** | NSN-NR.: **6510-01-558-3342**

US PATENT-7,652,190 yderligere amerikanske og udenlandske patenter afventer



BRUGSANVISNING


Sådan påføres bandagen

1



Riv op

2

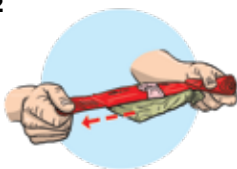

Stræk

3



Fjern gaze

4



Placer gaze på såret

5



Placer bandagen ovenpå

6



Pak ind

7



Fastgør

CE 1984

STERILE R



TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS, LLC

TELEFON 864.224.0081
GRATISNUMMER 1.888.822.6331
FAX 864.224.0064
E-MAIL info@tacmedsolutions.com
WEB tacmedsolutions.com

1250 Harris Bridge Road, Anderson, SC 29621