

MODULAARINEN OLAES®-SIDOS

4 tuuman sidoksen osanumero: **OAL-4** | 6 tuuman sidoksen osanumero: **OAL-6** |

4 tuuman litteäksi pakatun sidoksen osanumero: **OALFP-4**

NSN-tunnus: **6510-01-558-3342**

US-PATENTTI 7 652 190. Muita US-patentteja ja muunmaalaisia patentteja on vireillä.



KÄYTTÖOHJEET


Sidoksen asettaminen

1




Repäise auki

2

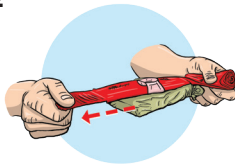

Venytä

3

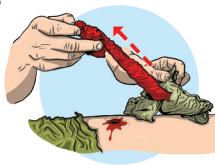

Poista harso

4



Aseta harso haavan
päälle

5




Aseta sidos
päällimmäiseksi

6



Kääri

7

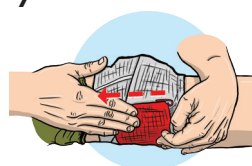

Kiinnitä

CE 1984

STERILE R



TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS, LLC

PUH. 864.224.0081
MAKSUTON 1.888.822.6331
FAKSI 864.224.0064
SÄHKÖPOSTI info@tacmedsolutions.com
VERKKOSIVU tacmedsolutions.com

1250 Harris Bridge Road, Anderson, SC 29621