

OLAES® MODULÆR BANDASJE

4" Bandasjedeler#: **OAL-4** | 6" Bandasjedeler#: **OAL-6** | 4" Flatpakkede deler#: **OALFP-4**

NSN#: **6510-01-558-3342**

US PATENT-7,652,190 ytterligere U.S. og utenlandske patenter ventende.



BRUKERINSTRUKSJONER


Å påføre bandasjen

1



Riv opp

2

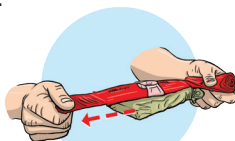

Streck

3



Fjern gasbind

4



Legg gasbind på såret

5




Legg bandasjen på toppen

6



Pakk inn

7

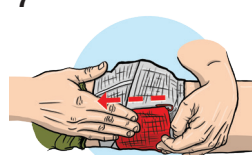

Feste

CE 1984

STERILE R



TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS, LLC

TELEFON 864.224.0081
GRONT NUMBER 1.888.822.6331
FAKS 864.224.0064
E-POST info@tacmedsolutions.com
WEB tacmedsolutions.com

1250 Harris Bridge Road, Anderson, SC 29621, USA