

OLAES® MODULÄRT FÖRBAND

Art-nr för 10 cm-förband: **OAL-4** | Art-nr för 15 cm-förband: **OAL-6** | Art-nr för 10 cm, platt förpackning: **OALFP-4**

NSN-nr: **6510-01-558-3342**

USA-PATENT-7,652,190, ytterligare patentansökningar pågår i USA och andra länder.



BRUKSANVISNING


Applicera förbandet

1




Riv isär

2

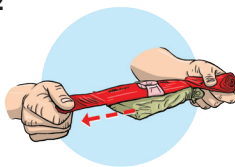

Sträck

3

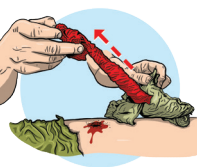

Ta ut gasväven

4




Placera väven på såret

5



Placera förbandet överst

6

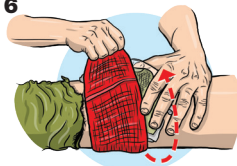

Linda

7



Fäst

CE 1984

STERILE R



TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS, LLC

TELEFON 864.224.0081
AVGIFTSFRITT 1.888.822.6331
FAX 864.224.0064
E-POST info@tacmedsolutions.com
WEB tacmedsolutions.com



1250 Harris Bridge Road, Anderson, SC 29621, USA