



BRUKSANVISNING – Manuell sugpump (Manual Vacuum Pump)

Avsett användningsområde

Manuell sugpump är en handdriven medicinteknisk produkt avsedd att generera undertryck för tillfällig borttagning av vätskor och sekret från luftvägarna i akuta och kliniska situationer.

Inte avsedd för kontinuerlig eller långvarig sugning.

Avsedda användare

Hälso- och sjukvårdspersonal samt utbildad ambulans-, räddnings- eller första hjälpen-personal.

Patientgrupp

Vuxna och barn, i enlighet med gällande kliniska riktlinjer.

Produktbeskrivning

Manuell sugpump är en lätt, bärbar och handdriven sugenhet utformad för enhandsmanövrering, så att den andra handen kan användas för andra uppgifter.

Produkten består av ett återanvändbart vakuumpumphandtag, en engångs uppsamlingsbehållare på 300 ml samt sugkatetrar för vuxna och barn.

Sugstyrkan kan justeras mellan 50 % och 100 % slaglängd.

Kontraindikationer

Använd inte produkten om någon komponent saknas, är skadad eller kontaminerad.

Använd inte produkten om pumphandtaget är sprucket eller skadat.

Varningar

- Produkten får inte användas upp-och-ned
- Autoklavera inga komponenter
- Sänk inte ned pumpen i vätska
- Får endast användas av utbildad personal

Försiktighetsåtgärder

Kontrollera att alla anslutningar är säkra före användning.

Om motståndet ökar, avbryt användningen och kontrollera om blockering föreligger.

Bruksanvisning

1. Välj lämplig sugkateterstorlek
2. Anslut katetern till uppsamlingsbehållaren
3. Fäst behållaren säkert på pumphandtaget
4. Välj 50 % eller 100 % slaglängd
5. Manövrera avtryckaren för att skapa undertryck
6. Avlägsna katetern långsamt efter användning

7. Kassera engångskomponenter enligt lokala rutiner

Prestanda

Undertryck vid 20 kPa (1 min): ≥ 15 kPa

Maximalt undertryck: $\geq 39,9$ kPa

Uppsamlingsbehållarens volym: 300 ml

Tekniska data

Drifttemperatur: -20 °C till $+50$ °C

Förvaringstemperatur: -40 °C till $+60$ °C

Nettovikt: 230 g

Rengöring

Rengör återanvändbara delar med varmt vatten och mildt rengöringsmedel.

Får inte autoklaveras.

Förvaring

Förvaras torrt. Skyddas mot skador. Följ angivna temperaturbegränsningar.

Symboler

Symboler överensstämmer med ISO 15223-1. Se märkning för symbolförklaringar.

UDI

UDI anges på produktens märkning och förpackning.

Tillverkare

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd.

No. 7th, Middle Xinzha Road,

Zhashang Industrial Zone, Yangshe Town,

Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, Kina

EU-auktoriserad representant

SUNGO Europe B.V.

Fascinato Boulevard 522, Unit 1.7

2909VA Capelle aan den IJssel, Nederländerna

Distributör

Heimdall Rescue

Innlaget 25, 3185 Skoppum, Norge

Regelöverensstämmelse

Denna medicintekniska produkt överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 (MDR).

Dokumentkontroll

IFU-MS-001 | Rev. 01 | 2026-01-20