



Bruksanvisning

Adult Head Immobilizer

Modell: XH-16A



1. Avsedd användning

Adult Head Immobilizer är avsedd att immobilisera och stabilisera en patients huvud under transport på ryggbräda eller bår i akut- och traumasituationer. Enheten hjälper till att minska huvudrörelser och bidrar till att upprätthålla korrekt positionering av halsryggraden.

Enheten är avsedd att användas av utbildad medicinsk personal inom ambulanssjukvård, sjukhus och räddningsinsatser.

2. Beskrivning av enheten

Huvudimmobilisatorn är utformad för att säkra patientens huvud under transport. Enheten består av en basplatta med fästremmar samt två laterala huvudstödblock med fästremmar.

Funktioner inkluderar:

- Anatomiskt formade huvudblock för patientstöd
- Stora öronöppningar som möjliggör övervakning av blödning eller vätskeutflöde
- Radiolucenta material kompatibla med röntgen-, CT- och MR-undersökningar
- Vattentät och lätt att rengöra yta
- Kardborresystem för säker fastsättning

Bruksanvisningen gäller följande produkter:

- Adult Head Immobilizer Red
- Adult Head Immobilizer Green



3. Komponenter

Varje enhet innehåller:

- 1 × Basplatta med åtta D-formade öglor
- 2 × Huvudstödblock med runda öppningar
- 2 × Immobiliseringsbälten
- 2 × Huvudremmar

4. Bruksanvisning

4.1 Fastsättning av basplattan

Placera basplattan på ryggbrädan.

För det övre mittbältet genom det centrala hålet i ryggbrädan (Figur 1).

Trä bältet genom D-öglan, vik tillbaka det och fäst det med kardborrefästet (Figur 2).



1

2

4.2 Fastsättning av basplattan på ryggbrädan

Använd de två bältena och de fyra mittersta D-öglorna för att fästa basplattan på ryggbrädan.

Fäst ena sidan av bältet i en D-ögla med hjälp av kardborrefästet (Figur 3, Figur 4).

Vänd ryggbrädan och fäst den andra sidan av bältet i den symmetriska D-öglan (Figur 5, Figur 6).

Se till att basplattan är ordentligt fastsatt på ryggbrädan.



3



4



5



6

4.3 Placering av huvudstödblock

Fäst ett huvudstödblock på ena sidan av basplattan med hjälp av kardborrefästet (Figur 7).

Placera försiktigt patientens huvud på basplattan (Figur 8).

Fäst det andra huvudstödblocket på motsatt sida av patientens huvud och justera det till rätt position för immobilisering av huvudet (Figur 9).

Se till att blocken är korrekt placerade. Huvudet ska inte immobiliseras för hårt och för stort avstånd mellan blocken ska undvikas.

Öppningarna i blocken möjliggör övervakning av blödning eller vätskeutflöde från öronen.



7



8



9



4.4 Säkring av huvudet

Placera en huvudrem över patientens panna och fäst den i de två symmetriska D-öglorna (Figur 10).

Placera den andra huvudremmen över patientens haka och fäst den i de återstående symmetriska D-öglorna (Figur 11).

Se till att patientens huvud är säkert immobiliserat samtidigt som patientens komfort bibehålls.



10



11

5. Varningar och försiktighetsåtgärder

- Får endast användas av utbildad medicinsk personal.
- Dra inte åt fästremmarna för hårt.
- Säkerställ att patientens luftvägar inte blockeras under immobilisering.
- Inspektera enheten före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Använd inte enheten om komponenter är skadade eller saknas.

6. Rengöring och underhåll

Efter varje användning:

- Rengör enheten med mildt rengöringsmedel och vatten.
- Torka av med en ren trasa.
- Undvik att sänka ner kardborrefästen i vatten under längre perioder.
- Låt enheten torka helt innan den förvaras.



7. Förvaring och transport

- Förvara i en torr och välventilerad miljö.
- Skydda mot överdriven värme och direkt solljus.
- Undvik att stapla tunga föremål på enheten under förvaring eller transport.



8. Produktens livslängd

Produkten ska inspekteras före varje användning. Byt ut enheten om synliga skador, kraftigt slitage eller försämrade fästförmåga uppstår.

9. Avfallshantering

Enheten ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser för medicintekniska produkter och plastmaterial.

10. Symboler på etikett

Symbol	Betydelse
CE	CE-märkt medicinteknisk produkt
LOT	Batchnummer
UDI	Unique Device Identification
Manufacturer	Tillverkarinformation
EU REP	Auktoriserad representant i EU
	Se bruksanvisning
	Förvaras torrt

11. Tillverkare

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd.
No.7th Middle Xinzha Road
Zhangjiagang City, Jiangsu, Kina



12. Auktoriserad representant i EU

Sungo Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7
2909VA Capelle aan den IJssel
Nederländerna

13. Distributör

Heimdall Rescue AS
Innlaget 25
3185 Skoppum
Norge