


# Bårlås för taxi - Portabel bårlås.

Passar Alfa och Beta modeller.

  
[www.fernonorden.com](http://www.fernonorden.com)

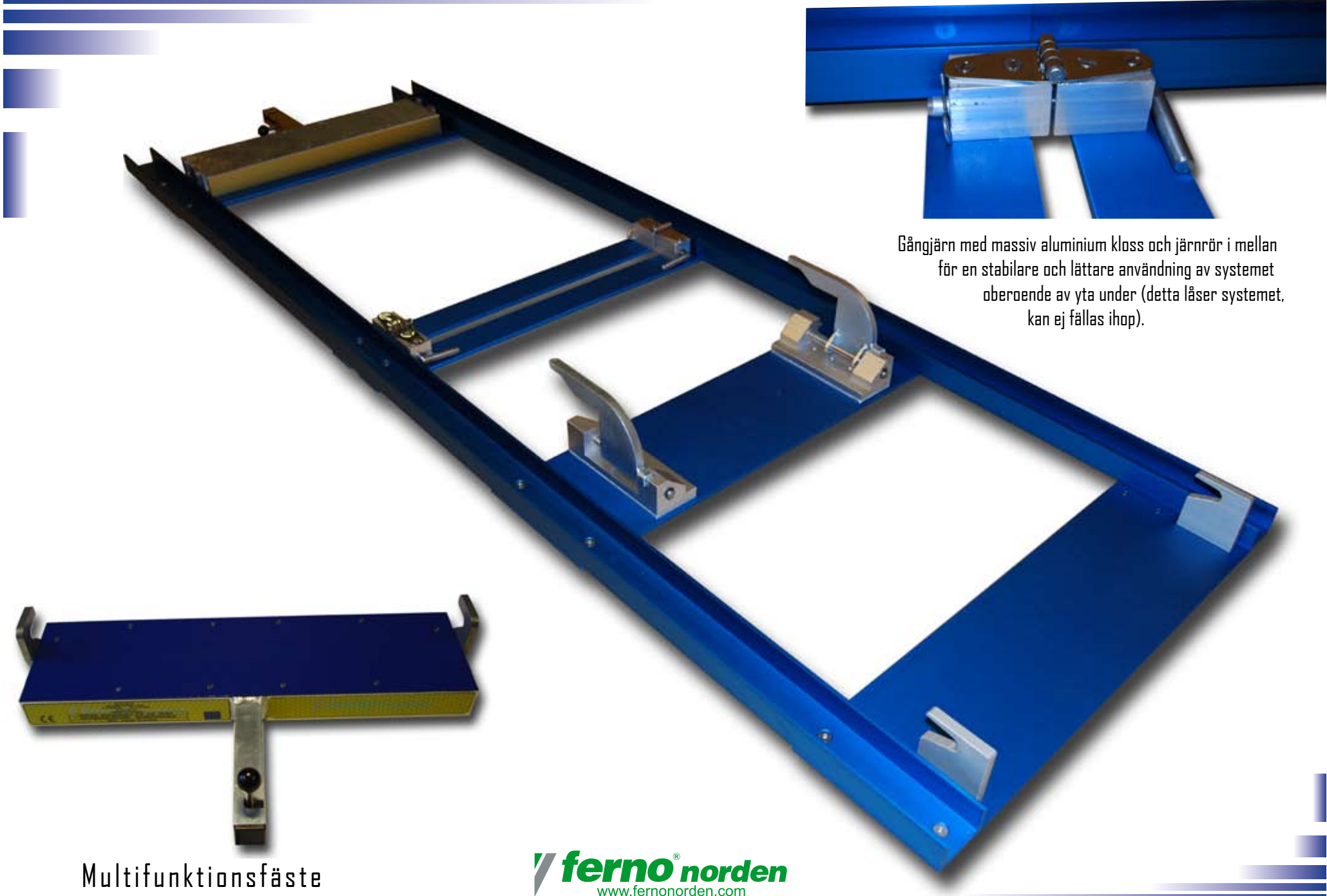

Gångjärn med massiv aluminium kloss och järnrör i mellan för en stabilare och lättare användning av systemet oberoende av yta under (detta låser systemet, kan ej fällas ihop).


Multifunktionsfäste

## Allfa europe med Taxilås



## Betabåren med Taxilås





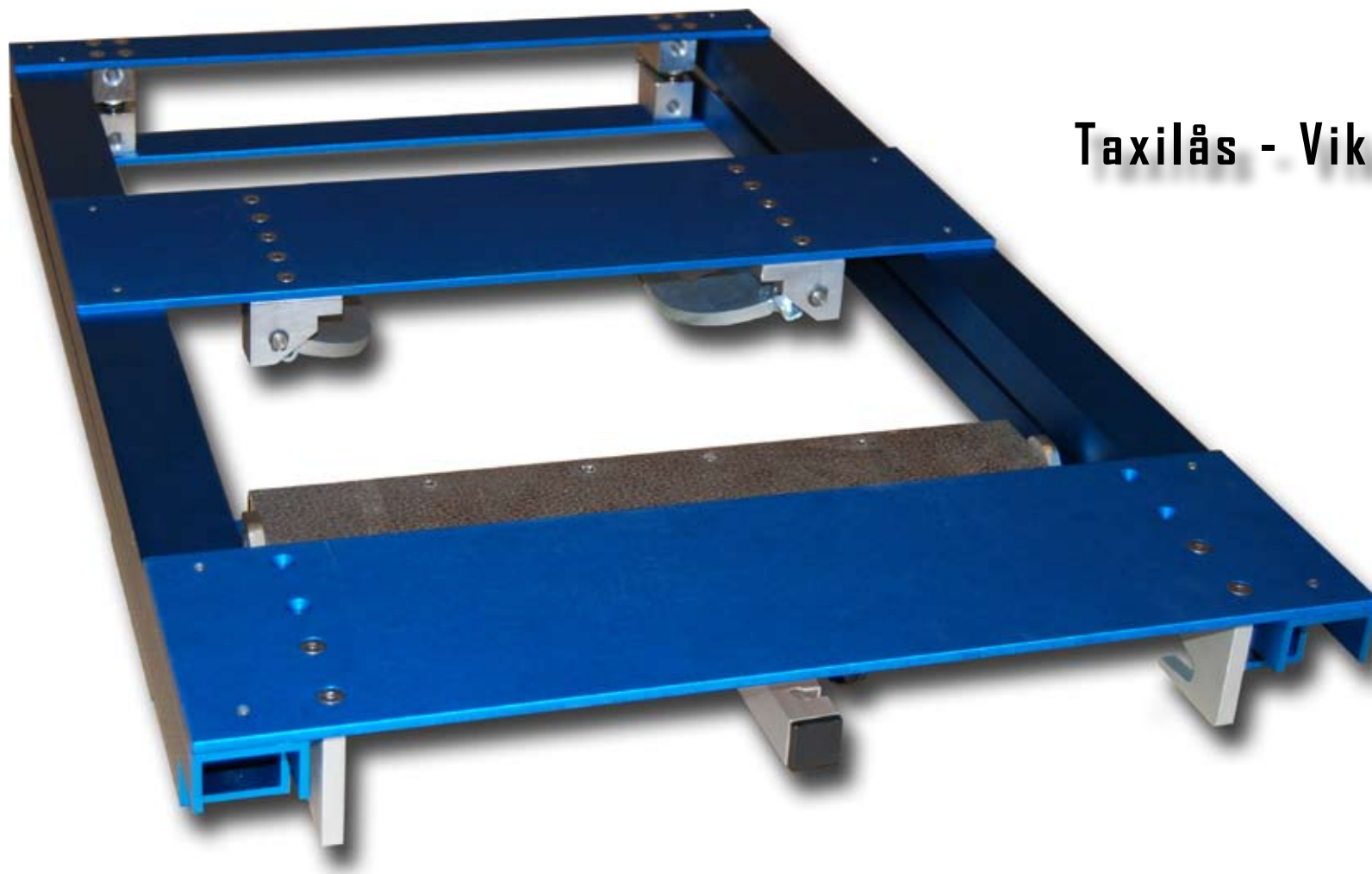


**Taxilås - Vikbart**







Foto: V70 Volvo



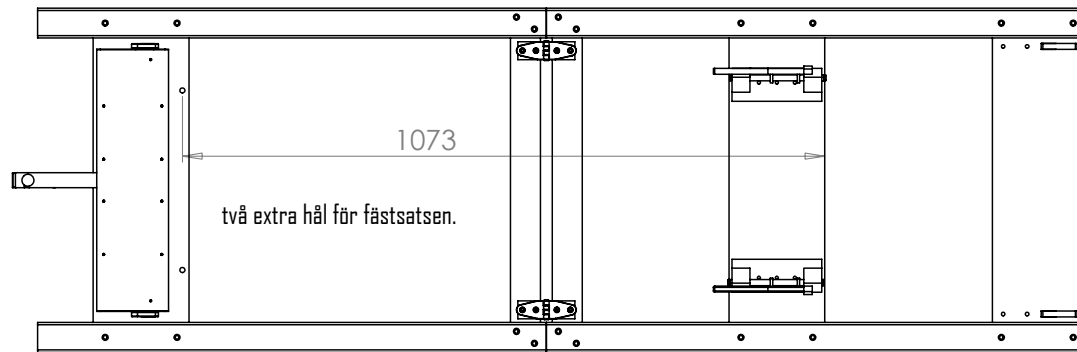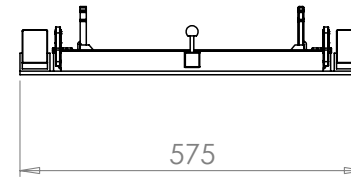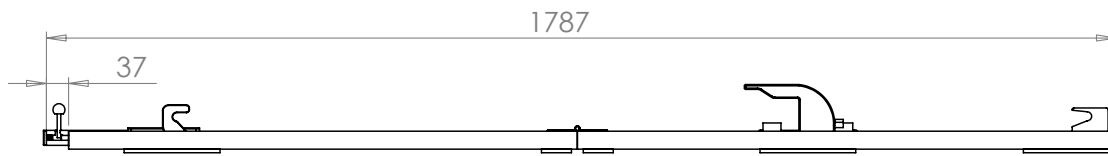


**Taxilås**  
Alla mått är i millimeter

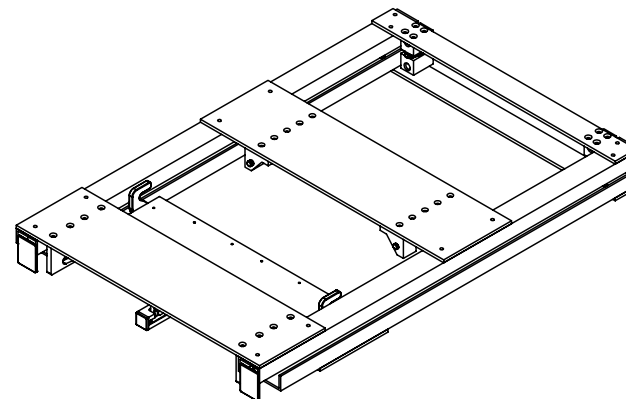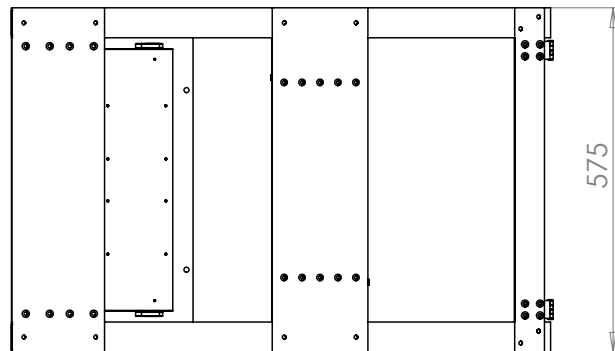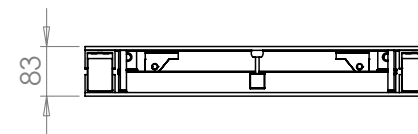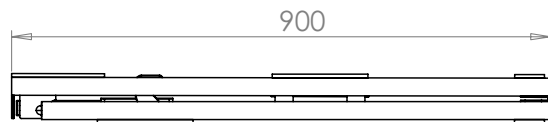



Taxilås med Fästsats (tillbehör)


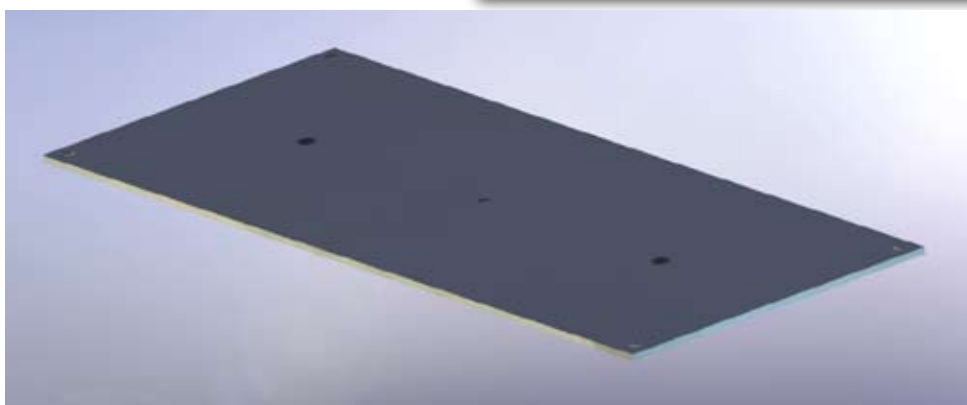


Fästplata vid Multifunktionsfästen (skall monteras från undersidan på underlaget)




Fästplata vid allfa-fästen (skall monteras på ryggsdelen/backsättet)



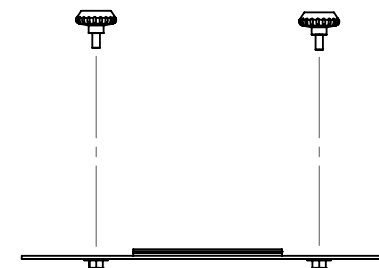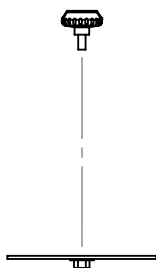

## Fästsats för Taxiläset (Tillbehör)

Alla mått är i milimeter

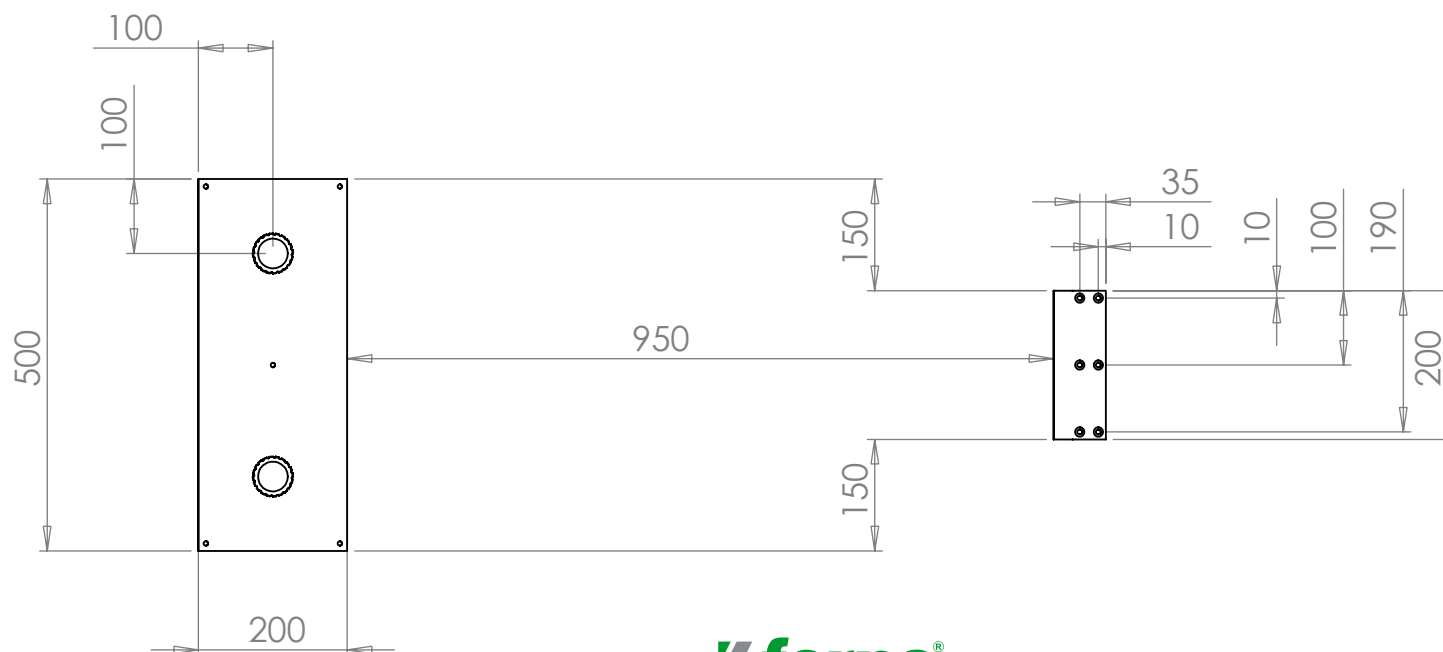

Viktigt! Läs igenom hela bruksanvisningen innan du påbörjar något.

Underlaget som Taxilåset skall monteras på bör vara:  
MINST 6 mm tjockt aluminium material eller 4 mm Stålmateriäl.

Tips!

1. Placera Taxilåset där du vill ha den (se foto: V70 Volvo).
2. Placera Fästsatsen som skall vara vid Alfa-fästen.
3. Markera hålen vid multifunktionsfästen (två extra hål för fästsatsen).
4. Markera även hålen vid Alfa-fästen på Fäststatsen.
5. Flytta på taxilåset och kontrollera måtten mellan alla punkter innan du skapar hålmönstret.
6. Borra hålen för respektive fästsats, OBS! Underlagets tjocklek. (Underlaget som taxilåset skall monteras på bör vara MINST 6 mm tjockt aluminium eller 4 mm Stålmateriäl material).

Skruva åt alla skruvar på plats och du är nu redo att använda Ferno Nordenes Taxilås.

Tips! Använd gärna "Locktite" eller "Låsmutter".