


FAST-LIFT X



RASK LØFT

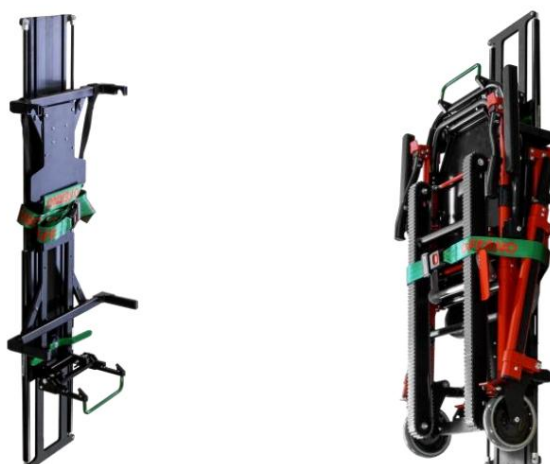



TIP: Regular cleaning helps reduce the risk of transmitting disease and enables the equipment to function at its optimum.

Ansvarsfraskrivelse

Denne håndboken inneholder generelle instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold av FAST-LIFT, FAST-LIFT X. Sikker og riktig bruk av FAST-LIFT, FAST-LIFT X er brukerens eget ansvar.

Sikkerhetsinformasjon gis som en tjeneste til brukeren. Alle andre sikkerhetstiltak skal være i samsvar med gjeldende forskrifter.

Det anbefales at brukere får opplæring i riktig bruk av FAST-LIFT, FAST-LIFT X før de tar den i bruk i en faktisk situasjon. Ta vare på denne håndboken for senere bruk.

referanse.

RASKLØFT, RASKLØFT X

Produktspesifikasjon

Lengde:	1296 mm
Bredde:	468 mm
Dybde:	FAST-LIFT X - 283 mm / FAST-LIFT - 212 mm
Vekt:	FAST-LIFT X - 19 kg / FAST-LIFT - 10,5 kg
Lastgrense:	30 kg

Produktnummer	Produktnavn
60-0254-001	FAST-LIFT X
60-0254-002	RASK LØFT



FAST-LIFT X-funksjoner

- Passer til FAST PREMIUM-, FAST- og FST-stoler
- Tilbyr assistert hydraulisk løfting (for eksempel på ambulansevegg eller dører, muligens også i innfelte oppbevaringsrom)
- Med justerbar forlengelse fremover/bakover
- Sikker stolen på en sikker måte

Fremgangsmåte for å fjerne stolen fra adapteren



Sørg for at FAST-LIFT X er i standardposisjon (figur 1).



Løsne sikkerhetsbeltet og trekk FAST-LIFT X-en mot deg mens du låser opp den grønne spaken på siden av FAST-LIFT X (figur 2).



Trekk den grønne spaken mot deg og
Flytt FAST-LIFT X nedover.

Flere låseposisjoner er tilgjengelige
(Figur 3).



Lås opp stolen med den grønne spaken på oversiden
av FAST-LIFT X. Trekk stolen ut for bruk.

Følg trinn 4 til 1 i omvendt rekkefølge (figur 4).



Fremgangsmåte for montering av stolen på FAST-LIFT X




Sørg for at FAST-LIFT X er i standardposisjon (figur 1).



Løsne sikkerhetsbeltet og trekk FAST-LIFT X-en mot deg mens du låser opp den grønne spaken på siden av FAST-LIFT X (figur 2).




Trekk den grønne spaken mot deg og beveg FAST-LIFT X nedover. Flere låseposisjoner er tilgjengelige. (Figur 3).

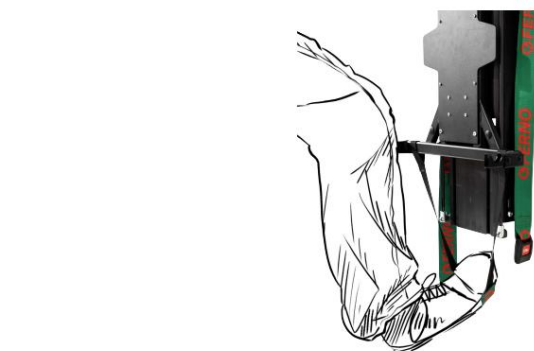

Trekk FAST-LIFT X ned til ønsket posisjon. Om nødvendig kan du hjelpe til ved å bruke foten i stroppen. Før du laster stolen, sett stroppen tilbake i sin opprinnelige posisjon (figur 4).



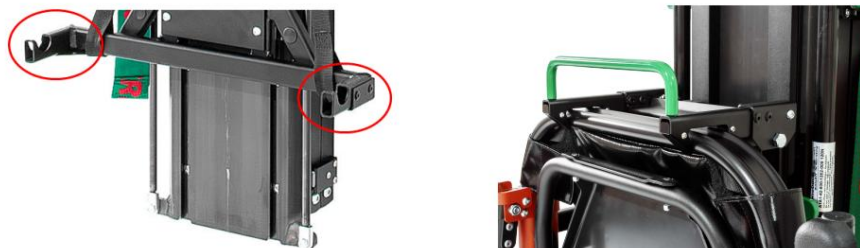

Plasser stolen på FAST-LIFT X. Den nedre delen av FAST-LIFT X settes inn i låsen, og i øvre posisjon klikker den på plass.

Deretter, bruk den grønne spaken på siden av FAST-LIFT X til å løfte stolen oppover og trykke stolen med FAST-LIFT X på plass.

(Figur 5).



Fest stolen med beltet (figur 6).

FAST-LIFT-funksjoner

- Passer til FAST PREMIUM-, FAST- og FST-stoler
- Gir assistert hydraulisk løfting (for eksempel på ambulansevegg eller dør)
- Sikker stolen på en sikker måte

Følg samme prosedyre for FAST-LIFT i vertikal retning, bortsett fra horisontal retning.

[Rengjøring og desinfeksjon]

LAST-LIFT og FAST-LIFT X er enkle å rengjøre og desinfisere. Tørk alle overflater grundig med et egnet desinfeksjonsmiddel. Følg produsentens anvisninger for desinfeksjonsmiddelet når det gjelder påføringsmetode og kontakttid.

Ferno Slovakia Kontakt:

Ferno Slovakia sro Bošáca 893 913 07
Slovakia

Mer informasjon på: www.fernosk.sk

