


PIKANOSTO X



PIKANOSTO

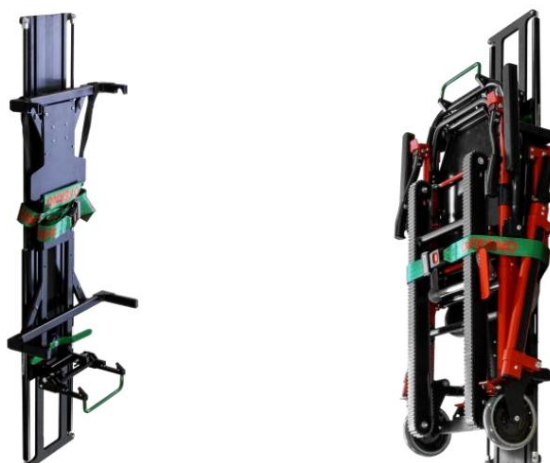



Read this manual and
retain for future reference

*TIP: Regular cleaning helps reduce
the risk of transmitting disease and
enables the equipment to function
at its optimum.*

Vastuuvapauslauseke

Tämä käyttöohje sisältää yleiset ohjeet FAST-LIFT, FAST-LIFT X -laitteen käyttöön, toimintaan ja hoitoon. FAST-LIFT, FAST-LIFT X -laitteen turvallinen ja asianmukainen käyttö on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Turvallisuustiedot tarjotaan käyttäjälle palveluna. Kaikkien muiden turvatoimenpiteiden tulee olla sovellettavien määräysten mukaisia. On suositeltavaa, että käyttäjät saavat koulutusta FAST-LIFTin, FAST-LIFT X:n asianmukaisesta käytöstä ennen sen käyttöönottoa todellisessa tilanteessa. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. viite.

PIKANOSTO, PIKANOSTO X

Tuotetiedot

Pituus:	1296 mm
Leveys:	468 mm
Syvyys:	PIKANOSTO X - 283 mm / PIKANOSTO - 212 mm
Paino:	PIKANOSTO X - 19 kg / PIKANOSTO - 10,5 kg
Kuormitusraja:	30 kg

Tuotenumero Tuotteen nimi	
60-0254-001	PIKANOSTO X
60-0254-002	PIKANOSTO



FAST-LIFT X:n ominaisuudet

- Sopii FAST PREMIUM-, FAST- ja FST-tuoleille
- Mahdollistaa avustetun hydraulisen noston (esimerkiksi ambulanssin seinälle tai oville, mahdollisesti myös syvennettyihin säilytystiloihin)
- Säädettävällä eteen-/taaksepäin ulottuvalla osuudella
- Kiinnittää tuolin turvallisesti


Tuolin irrottaminen sovittimesta



Varmista, että FAST-LIFT X on normaaliasennossa (kuva 1).



Irrota turvavyö ja vedä FAST-LIFT X -nostinta itseäsi kohti samalla, kun avaat FAST-LIFT X:n sivussa olevan vihreän vivun (kuva 2).

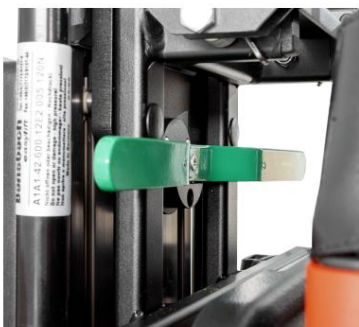

Vedä vihreää vipua itseäsi kohti ja siirrä FAST-LIFT X -laitetta alaspäin.

Useita lukitusasentoja saatavilla (Kuva 3).



Avaa tuolin lukitus FAST-LIFT X:n yläosassa olevalla vihreällä vivulla. Vedä tuoli ulos käyttääksesi sitä.

Suorita vaiheet 4–1 käänteisessä järjestyksessä (kuva 4).



Tuolin asentaminen FAST-LIFT X -nostimeen



Varmista, että FAST-LIFT X on asennossa vakioasennossa (kuva 1).



Irrota turvavyö ja vedä FAST-LIFT X -nostinta itseäsi kohti samalla, kun avaat FAST-LIFT X:n sivussa olevan vihreän vivun (kuva 2).




Vedä vihreää vipua itseäsi kohti ja siirrä FAST-LIFT X -nostinta alaspäin. Käytettävissä on useita lukitusasentoja. (Kuva 3).



Vedä FAST-LIFT X alas haluttuun asentoon; tarvittaessa voit auttaa käyttämällä hihnaan asetettua jalkaasi. Ennen tuolin lastaamista palauta hihna alkuperäiseen asentoonsa (kuva 4).



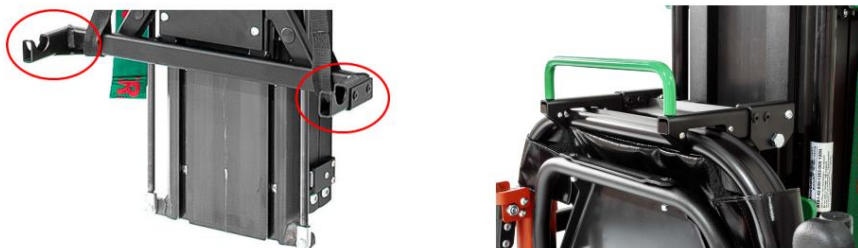

Aseta tuoli FAST-LIFT X:n päälle. FAST-LIFT X:n alaosa työnnetään lukkoon ja yläasennossa se napsahtaa paikalleen. Nosta sitten tuolia ylöspäin käyttämällä FAST-LIFT X:n sivussa olevaa vihreää vipua ja paina tuoli FAST-LIFT X:n kanssa paikalleen. (Kuva 5).



Kiinnitä tuoli kiinnitysraudalla (kuva 6).

PIKANOSTO-ominaisuudet

- Sopii FAST PREMIUM-, FAST- ja FST-tuoleille
- Mahdollistaa avustetun hydraulisen noston (esimerkiksi ambulanssin seinälle tai ovelle)
- Kiinnittää tuolin turvallisesti

Noudata samaa menettelyä FAST-LIFTille pystysuunnassa, paitsi vaakasuunnassa.

[Puhdistus ja desinfiointi]

LAST-LIFT, FAST-LIFT X on helppo puhdistaa ja desinfioida. Pyyhi kaikki pinnat huolellisesti sopivalla desinfiointiaineella. Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita käyttömenetelmän ja vaikutusajan osalta.

Ferno Slovakia Yhteystiedot:

Ferno Slovakia sro Bošáca 893 913 07
Slovakia

Lisätietoja osoitteessa: www.fernosk.sk



Ferno Slovakia sro
913 07 Bosaca 893 Slovakian tasavalta
sales.sk@ferno.com