



Användarmanual



FST-trappstol (Fasta larvfötter)



September 2021, ver. 06

Pub nr 50-8110-010_06



Ferno Slovakia s.r.o.

913 07 Bosaca 893 Slovak Republic
Tel: + 421 (0) 32 7708 010, sales@ferno.sk
Fax: + 421 (0) 32 7708 011

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Varning | 4 |
| Teknisk specifikation: | 4 |
| Använda patientbälten | 6 |
| 4-punktsbälten (tillbehör) | 7 |
| 1. Snabbguide | 8 |
| 1.1 Fälla ut stolen | 8 |
| 1.2. Justera handtaget | 9 |
| 1.3. Fälla ut och fälla in larvfötter | 10 |
| 1.4. Teleskopiska bärhandtag | 11 |
| 1.5. Fälla ihop stolen | 12 |
| 1.6. Fotstöd | 13 |
| 2. Avsedd användning | 14 |
| 3. Säkerhetsföreskrifter | 14 |
| 3.1. Operatörsfärdigheter | 14 |
| 3.2. Operatörsutbildning | 14 |
| 3.3. Varning | 15 |
| 4. FAST-stol | 16 |
| 4.1. Att fälla ut och fälla ihop stolen | 16 |
| 4.2. Höjdpositionering övre handtag | 16 |
| 4.3. Förlänga teleskopiska bärhandtag | 16 |
| 4.4. Patientbälten | 17 |
| 4.5. FAST-stol hjul | 17 |
| 4.6. FAST-stol | 17 |
| 4.7. Kontroll av FAST-stol | 18 |
| 5. Driftförfarande | 19 |
| 5.1. Allmän information | 19 |
| 5.2. Flytta stolen | 19 |
| 5.3. Använda stolen på plan mark | 20 |
| 5.4. Använda stolen i trappa | 20 |
| 6. Skötsel av FAST-stolen | 22 |
| 6.1. Desinfektion | 22 |

| | |
|---|----|
| 6.2. Rengöring | 22 |
| 7. Använda ytterligare hjälp | 23 |
| 8. Underhåll | 24 |
| 9. Garanti och service | 24 |

Varning



Läs den här handboken och behåll för framtida referens

Denna manual innehåller allmänna instruktioner för användning, drift och skötsel av denna stol. Instruktionerna är inte allomfattande. Säker och korrekt användning av denna stol är endast användarens eget gottfinnande. Säkerhetsinformation ingår som en tjänst för användaren. Alla andra säkerhetsåtgärder som vidtas av användaren bör vara inom och under beaktande av gällande bestämmelser. Vi rekommenderar att du får utbildning i korrekt användning av stolen innan du använder stolen i en verklig situation.

Spara den här manualen för framtida referens. Inkludera den med stolen vid överföring till nya användare. Ytterligare gratis kopior är tillgängliga på begäran från FERNO Manufacturing.



Teknisk specifikation:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| <i>Sittdjup</i> | <i>450 mm</i> |
| <i>Sitthöjd från golv</i> | <i>475 mm</i> |
| <i>Sittbredd</i> | <i>415 mm</i> |
| <i>Hjul fram / dia /</i> | <i>125 mm</i> |
| <i>Hjul bak/ dia /</i> | <i>150 mm</i> |
| <i>Topphandtagets höjd max</i> | <i>580 mm</i> |
| <i>Total längd</i> | <i>695 mm</i> |
| <i>Totala höjden</i> | <i>1000 mm</i> |
| <i>Total bredd</i> | <i>516 mm</i> |
| <i>Vikt / utan utrustning /</i> | <i>13,8 kg</i> |
| <i>Lastkapacitet</i> | <i>250 kg</i> |

TIPS: Regelbunden rengöring hjälper till att minska risken för överföring av sjukdomar och gör det möjligt för utrustningen att fungera optimalt

! VARNING

Otränade operatörer kan orsaka skador eller skadas. Tillåt endast utbildad personal att använda stolen.

Felaktig användning av stolen kan orsaka personskador. Använd stolen endast för det ändamål som beskrivs i denna manual.

Felaktigt fastsättning av bälten kan göra att säte och ryggpanel lossnar, vilket kan leda till skador. Bälten måste fästas runt panel och stolsram.

Smörjning av larvfötter kan leda till skada på patienten och / eller operatören. Smörj aldrig spåren eller remmen.

Felaktig användning kan orsaka personskador. Använd stolen endast enligt beskrivningen i denna manual.

En oönskad patient kan skadas. Stanna hela tiden med patienten.

En obältad patient kan falla av stolen och skadas. Använd stolens bälten för att säkra patienten på stolen.

Medhjälpare kan orsaka skada eller skadas. Behåll kontrollen över stolen och styr alla medhjälpare. Felaktigt underhåll kan orsaka skador. Underhåll endast stolen enligt beskrivningen i denna manual.

Att fästa felaktiga föremål på stolen kan orsaka personskador. Använd endast Ferno-godkända föremål på stolen.

Felaktiga delar och service kan orsaka personskador. Använd endast Ferno-delar och Ferno-godkänd service på stolen.

Att ändra stolen kan orsaka personskador och skador. Använd stolen endast enligt design av Ferno.

**RESERVDELAR:**

| Artikel | Artikelnummer | Beskrivning | QNT. |
|---------|---------------|---|------|
| 1 | 65-4119-001 | LÅSANDE VAJER | 1 |
| 2 | 65-0400-001 | LARVBAND | 1 |
| 3 | 65-4113-001 | TELESKOPISKA HANDTAG | 2 |
| 4 | 65-4155-001 | LÅSANDE VAJER FRAM | 1 |
| 5 | 75-0004-044 | FRONT STOLHJUL 125 MM | 2 |
| 6 | 75-0004-043 | BAKSTOLHJUL 150 MM | 2 |
| 7 | 65-4118-001 | SÄTE VINYL FS STOL | 1 |
| 8 | 65-4126-001 | HUVUDSTÖD | 1 |
| 9 | 65-0209-002 | FOTBÄLTE, 50 MM (S-240 \ 242) | 1 |
| 10 | 65-0212-005 | BÄLTE, 1 ST 180 CM, BLAK PP, PLASTSPÄNN | 2 |
| 11 | 50-4219-001 | RÖR BAKHJUL HEX SPÅR | 1 |

TILLBEHÖR:

| Artikel | Artikelnummer | Beskrivning | QNT. |
|---------|---------------|-------------------------|------|
| 12 | 65-4122-001 | BAKRE HANDTAG | 1 |
| 13 | 65-4130-001 | KOMFORT FOTSTÖD | 1 |
| 14 | 65-4123-001 | NÄT FÖR SYRGASFLASKA | 1 |
| 15 | 62-4400-001 | 4-PUNKTS BÄLTE | 1 |
| 16 | 65-4148-001 | KIT AXLE BAR BACK WHEEL | 1 |
| 17 | 65-4128-001 | ARMSTÖD SET | 1 |
| 18 | 65-4137-001 | FRONTHJULS LÅSNINGSSATS | 1 |

CE-märket på denna produkt visar överensstämmelse med kraven i direktiv Annex IV + Annex VIII of MDR 2017/745 för medicintekniska produkter och EN 1865.



Använda patientbälten

Använd lår- och benbältet för att fästa patienten i stolen. Bedöm patientens tillstånd för att bestämma det optimala bältesförfarandet.

- Bröstmottet kan också användas för att säkra stolen när den är stängd för förvaring. Fäst bröstbältet med hjälp av plastspännet hona / hane. Dra i den lösa, fria änden av bältesremmen för att dra åt bältet.



- Fobälte: När patientens fötter har placerats bekvämt på det integrerade fotstödet, kan det lösa fotbältet fästas för att säkra fötterna. Fäst bältet med hjälp av plastspännet i plast. Dra i den lösa fria änden av bältesremmen för att dra åt bältet. Kom ihåg att fotbältet också skyddar operatören när du flyttar stolen i trappor.



- Lossa bälten: För att lossa fot-, bröst- och lårbälte, pressa in de båda sidorna av tangen på spännet inåt samtidigt för att dra isär spännet.



4-punktsbälten (tillbehör)

1. För att fästa sätesbältet, lägg fast fästet på toppen av sätespanelen och mata fast han- och honänden på bälena genom spåren.
2. Vik bältesremmen runt stolens aluminiumram på vardera sidan om stolen och omslut både panelen och ramen.
3. Spänn ältet och justera längden.
4. Upprepa steg 1-3 för att fästa bältet på ryggspanelen.



1. Snabbguide

1.1 Fäll ut stolen

I denna guide kommer FAST-stolen (fasta larvfötter) att kallas stol och den person som transporteras på stolen kommer att kallas patienten.

Stolen lämnas normalt i ihopfällt skick och den första uppgiften blir att fälla ut och göra stolen säker för transport av en person.

Lås upp bröstbandet som håller fast stolen och fäll ut stolen i sittande läge.

Fäll ut stolen helt genom att hålla handtaget upprätt och trycka nedåt på sätet tills ett hörbart klick hörs, detta är låsstiftet som glider på plats, bekräfta detta visuellt innan du sätter en patient.



⚠ VARNING

Fäll inte ner fotstödet förrän patienten sitter på stolen!!

1.2. Justera handtaget

Stolen är utrustad med ett justerbart höjdhandtag. För att justera handtaget måste operatören dra upp den röda vajern under handtaget. Detta frigör handtaget för att glida uppåt eller nedåt. När önskad position uppnås släpper man vajern.




Dra den röda vajern under handtaget uppåt och skjut handtaget uppåt eller nedåt till önskat läge.



Slutlig position, helt uppdraget handtag.

När patienten sitter bekvämt på stolen drar du ner fotstödet och placerar fötterna på det. Fäst alla bälten för att säkra patienten.

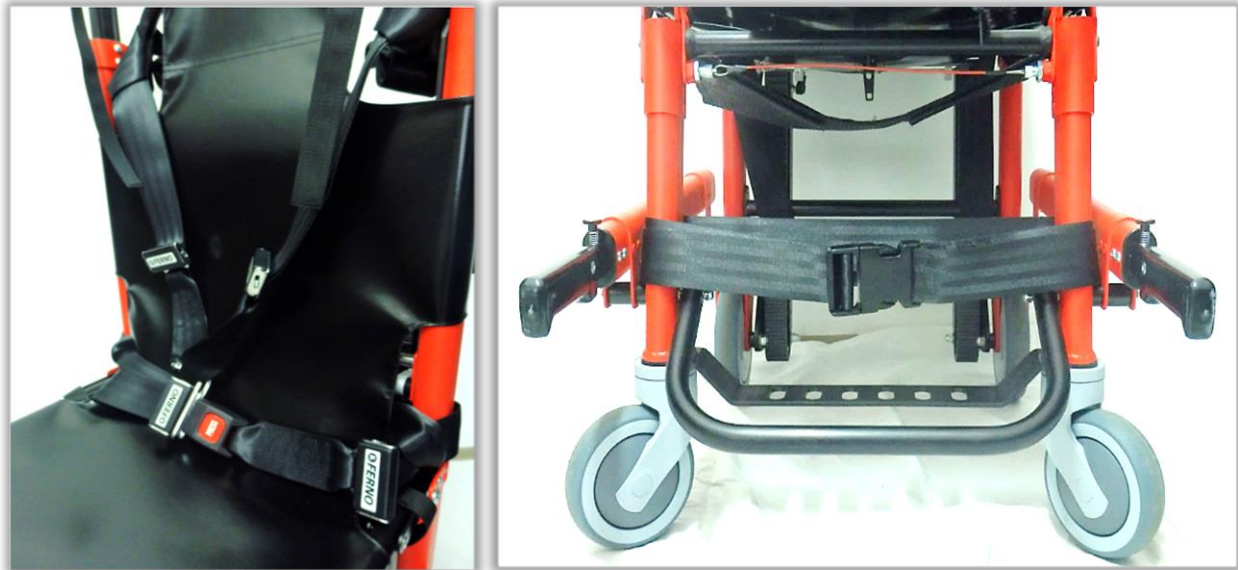

1.3. Fälla ut och fälla in larvfötter

Larvfötterna hjälper nedstigningen i trappan, fall inte ut larvfötterna om stolen inte ska användas i trappa. För att fälla in larvfötterna mot stolens rygg trycker du spaken nedåt så som visas, tills det ligger i linje med stolens rygg och låser sig i läge.



För att fälla ut larvfötterna från stolens baksida drar du stängningen som är monterad på larvfötterna tills det låses fast.



1.4. Teleskopiska bärhandtag

Stolen är utrustad med teleskopiska bärhandtag för att hjälpa till att bära eller manövrera stolen nerför trappan. För att ändra handtagen, tryck på knappen och dra handtagen ut eller in för att förlänga eller förkorta. Efter användning skjuts båda handtagen tillbaka till startpositionen.



1.5. Fälla upp stol



Dra den röda vajern under sätet utåt



Fäll upp sätet




Fortsätt att fälla sätet till sitt vikta läge



Vikt läge

1.6. Fotstöd

Innan du fäller ihop stolen för förvaring ska du se till att hjul är låsta framåt, fotstödet är uppåt och att alla handtag inte är utdragna.

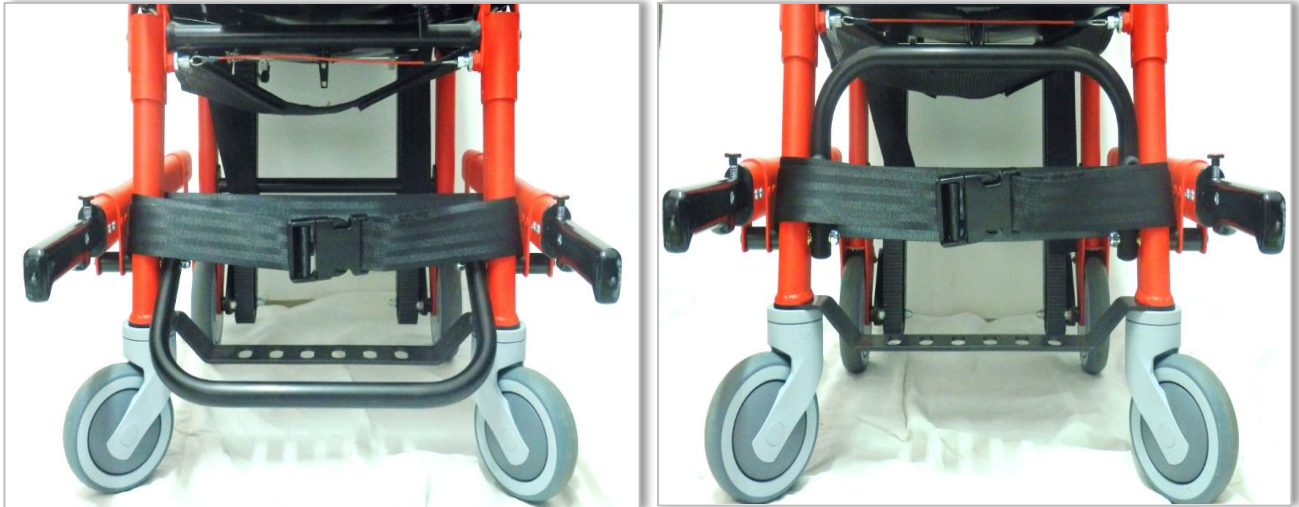

Fotstödet är en del av denna stol. För att fälla ut är det drar man det nedåt och för uppfällning för man upp det mot stolramen.



2. Avsedd användning

I denna handbok kommer FAST-stolen (fasta larvfötter) att kallas stol och den person som transporteras på stolen kommer att kallas patienten. Stolen är en hanteringsanordning som är utformad för att transportera en patient i sittande läge på trappor och plan mark. Stolen glider smidigt nerför ett stort antal trapp typer och kan snabbt återvända till en fyrhjulstol i slutet av en trappsteg. När den är på två eller fyra hjul kan den rotera inom sin egen längd vilket gör den idealisk för trappavsatser och liknande begränsade områden. Om förhållandena kräver kan stolen också bäras med hjälp av halkfria greppområden.

3. Säkerhetsföreskrifter

För att säkerställa säkerhet och tillfredsställelse med din nya stol, bör alla användare läsa dessa instruktioner och de enskilda delarna av erkända akutvårdshandböcker som gäller tillämpning och användning av bärstolar. Det rekommenderas att minst två utbildade operatörer kontrollerar en lastad stol i trappor. De bör bedöma om ytterligare hjälp krävs.

3.1. Operatörsfärdigheter

Minsta rekommenderade färdigheter är följande:

- Styrka, balans, samordning och sunt förnuft för att på ett säkert sätt använda stolen.
- Förmågan att välja rätt utrustning och procedurer för olika omständigheter.
- Operatörer ska ha utbildats i hur stolen fungerar.
- Förmågan att förstå och följa de procedurer som beskrivs i denna manual.
- Operatörer bör ha kunskap om akuta patienthanteringsförfaranden.


3.2. Operatörsutbildning


Minsta rekommenderade utbildning är följande:

- En utbildningsplan godkänd av utbildningsansvarig (eller motsvarande).
- Läs och förstå instruktionerna i denna manual.
- Öva på att använda den fullt utrustade stolen med vikt under simulerade förhållanden.
- Prsonal bör testas för att verifiera sin förståelse för stolen.
- Håll träningsregister. Årlig repetitionsträning rekommenderas för alla som använder stolen.


3.3. Varning

Varningsmeddelanden indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till personskada eller dödsfall.


|  VARNING |
|--|
| Blekmiddel, fenoler och jod kan orsaka skador. Applicera inte produkter som innehåller dessa kemikalier på stolen. |
| Felaktiga smörjmedel kan orsaka skador. Använd lätt olja för att smörja stolen. Smörj inte larvfötterna! |

|  VARNING |
|--|
| Anmärkning om blodburna sjukdomar - För att minska risken för exponering för blodburna sjukdomar (som HIV-1 och hepatit), när du använder stolen, följ instruktionerna för underhåll i denna manual. |
| Bakre låsande lyfthandtag är endast avset för transport i trappor, inte för stolsvängning. |

|  VARNING |
|---|
| SMÖRJ ALDRIG och låt INTE smörjmedel komma i kontakt larvfötterna! |

|  VARNING |
|---|
| Fäll ut larvfötterna för användning endast när det är patient på och bara när du behöver flytta patienten ner i trappa. |

Var tredje månad smörjer du gångjärnsstiften med lätt olja med särskild uppmärksamhet på tvärsnittsbultarna.

|  VARNING |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Överskrid aldrig den maximala lastkapaciteten på 250 kg. ✓ Endast kvalificerad personal som är utbildad i att använda stolen får använda den. ✓ Av säkerhetsskäl är det viktigt att patienter alltid skyddas med bälten. ✓ Lämna aldrig stolen obevakad med patient på. ✓ En olastad stol kan tippa bakåt. Om den står i en lutning. Ställ stolen stabilt med hjulen låsta. ✓ Undvik snabb repositionering - detta kan skada patienten. Stöd stolen medan du justerar handtagen. ✓ Upprätta regelbundna inspektionsförfaranden och ansvara för att säkerställa korrekt underhåll enligt beskrivningen. ✓ I fall av ryggrads- eller vissa frakturskador rekommenderas inte användning av stolen för patientflyttning. ✓ Lämna aldrig stolen utan stöd ifrån personal med patient på, eftersom stolen är utformad för att lätt lutas bakåt. ✓ Felaktigt underhåll kan orsaka personskador och oförutsägbar drift. Underhåll endast stolen enligt beskrivningen i denna manual. ✓ Felaktiga delar och service kan orsaka personskador och skador. Använd endast FERNO-godkända delar och service |

4. FST-stol (fasta larvfötter)

- Se snabbguide

4.1. Fälla ut och fälla ihop stolen

Stolen fälls ihop för frakt och förvaring.

Att fälla ut

1. Lossa bröstbältet från stolen och låt stolen fällas ner i sittande läge.
2. Fäll ut stolen helt genom att hålla i handtaget upprätt och trycka nedåt på sätet tills ett hörbart klick hörs, det här är låsstiftet som glider på plats, bekräfta detta visuellt innan du sätter en patient.

Att fälla ihop

Se till att följande procedur utförs vid fällning av stolen:

1. Sänk ned det övre handtaget (se nedan).
2. Kontrollera att bärhandtagen på stolens framsida inte är utdragna.
3. Se till att fotstödet är uppfällt.
4. Se till att larvfötterna falls upp mot stolens baksida.
5. Se till att bakhjulen är låsta och att de främre hjulen är vända framåt innan den fälls ihop. Detta möjliggör enkel och säker ihopfällning.
6. För att lossa stolen för ihopfällning drar du den röda vajern under sätet utåt och fäller stolen framåt tills den falls ihop helt.
7. Håll stolen upprätt på bakhjulen.
8. Hjulen kan nu låsas upp så att stolen kan rullas på plats.
9. Stolens bröstbälte kan användas för att säkra stolen i stängt läge.

4.2. Höjdpositionering övre handtag

Det övre handtaget kan låsas i fyra olika lägen för att underlätta manövrering i trappor och för att möjliggöra höjdvariationer mellan operatör och patient. Stolen är utrustad med ett justerbart höjdhandtag. För att justera handtaget till annat önskat läge drar man i den röda vajern på baksidan. När du justerat till önskad nivå släpps vajern. Känn efter så att handtaget är låst innan användning i trappan.

4.3. Förlänga teleskopiska bärhandtag

De teleskopiska bärhandtagen är placerade på stolens framsida precis ovanför länkhjulen och ska användas tillsammans med larvfötterna. När du använder larvfötterna förlänger du handtagen för att passa operatörens höjd.

Handtagen kan enkelt förlängas eller förkortas genom att trycka ner knapparna på handtagen med tummen och dra eller trycka i handtagen för att förlänga eller förkorta. Se till att handtagen är låsta innan du försöker lyfta eller bära stolen.

4.4. Patientbälten

Använd lår/ benbältet för att fästa patienten i stolen. Bedöm patientens tillstånd för att bestämma det optimala bältesförfarandet.

1. Bröstbältet kan också användas för att säkra stolen när den är stängd för förvaring. Fäst bröstspännet med ett spännsystem för hane / hona i plast. Dra i den lösa fria änden av bältesremmen för att dra åt bältet.

2. Fotbälte - När patientens fötter har placerats bekvämt på det integrerade fotstödet kan det lösa fotbältet fästas för att säkra fötterna. Fäst fotremmen med spännsystemet för hane / hona av plast. Dra i den lösa fria änden av bältesremmen för att dra åt.

3. Lossa bälten- För att lossa bälten, pressa in de två sidorna av tangenten på spännet samtidigt och dra isär spännet.

4.5. FST-stol Hjul

Stolen är utrustad med två stora hjul med bromsar bak och två svängbara hjul fram.

- Stolen kan rullas med alla fyra hjulen där de främre svänghjulen ger utmärkt manövrerbarhet, alternativt, om förhållandena kräver det, kan stolen lutas bakåt och köras på de två större hjulen. Informera ALLTID patienten om dina avsikter.

- För att bromsa bakhjulen, tryck ner bromspedalen ovanför hjulen. För att lossa bromsen, tryck upp bromspedalen med foten.

4.6. FST-stol (Fasta larvfötter)

Förutom hjulen är stolen utrustad med larvfötter som gör att stolen kan glida nerför trappan istället för att lyftas och bäras.

Riktlinjer för användning av larvfötterna:

- Att använda stolen i trappan kräver minst två utbildade operatörer. FERNO Manufacturing rekommenderar att man använder en tredje person som en "spotter" (se, använda stolen i trappan).

- Kontrollera att larvfötterna är helt öppnade och låsta på plats innan du använder dem.

- Kontrollera att teleskophandtagen är låsta i position innan du lyfter.

- Smörj aldrig larvfötterna. Smorda larvfötter kan fungera oförutsägbart, vilket kan leda till skada på patienten och / eller operatören.

- Fukt, vatten, snö, is eller skräp på eller mellan spåret och remmarna kan orsaka oregelbundna bandremsprestanda som resulterar i plötsliga förändringar som operatörerna måste manövrera. Se till att larvbanden är rena och torra innan du använder stolen i trappan.

- Rensa alltid trappor från skräp etc. som kan störa stolens funktion eller hindra operatörerna.

Fälla ut larvfötterna:

1. Ta tag i stolens ovansida med ena handen och tag i den andra tag i stången (röd märkt) och dra den bakåt tills larvfötterna låses helt i utfällt läge.

2. Kontrollera att låset är inkopplat genom att försöka stänga larvfötterna. Om låset är helt inkopplat kommer larvfötterna inte att röra sig tillbaka.

Fälla in larvfötterna:

För att fälla in larvfötterna på stolens baksida trycker du spaken på höger sida nedåt tills larvfötterna är i jämnhöjd med stolens rygg och låser sig i läge. Håll fast stolen med andra handen.

4.7. Kontroll av FST-stolen

Följande kontroller krävs varje dag innan stolen används:

- Stolens övergripande renhet.
- Kontrollera att det inte finns några böjda eller skadade delar, saknade bälten etc.
- Kontrollera att hjulen roterar fritt utan överdriven rörelse eller skada.
- Kontrollera att stolen viks ut och låses fast i sittpositionen för normal användning.
- Kontrollera att larvfötterna öppnas och stängs korrekt, undersök banden för skador.
- Kontrollera klädseln för sprickor, lösa delar eller sömmar etc.
- Kontrollera att klädseln är ordentligt fastsatt på ramen.

Om du är osäker, kontakta FERNO.

5. Driftförfarande

5.1. Allmän information

VIKTIGT:

Informera alltid patienten innan en manöver.

Stol i drift kräver minst:

- Två utbildade operatörer när stolen används för att transportera en patient i trappor.
- Endast en operatör kan säkert använda stolen på plana ytor inklusive enkla steg, trösklar etc. men detta måste ske av en operatör som kan bedöma olika förhållanden.
- En operatör kan säkert lasta/lossa en patient med stolen från ett fordon utrustat med en ramp, automatisk baklyft eller annan godkänd mekanisk lyftmekanism.
- Omständigheter som tillgänglighet, väderförhållanden eller patientens vikt kan kräva ytterligare hjälp när man arbetar i trappor; detta måste bedömas vid varje tillfälle men tänk på följande:

1. Placeringstekniker, tunga patienter, grov terräng eller ovanliga omständigheter kan kräva ytterligare hjälp. Detta måste bedömas vid varje tillfälle.

2. Tänk på stolens belastningsgräns när du arbetar med en tung patient. Om man misstänker att lastgränsen har överskridits bör en fullständig inspektion av stolen utföras.

3. Operatörer måste vidta extra försiktighetsåtgärder när man använder stolen på ojämnt underlag. Om marken är för ojämn kan man förflytta patienten genom att dra stolen bakåt. Med patientens baksida vänd mot operatören.

VARNING

Regelbunden rengöring minskar risken för överförande av sjukdom och möjliggör utrustning för att fungera optimalt

4. Extra försiktighetsåtgärder bör vidtas för att förhindra att stolen glider i ogynnsamma, våta eller isiga väderförhållanden.
5. Stanna hela tiden med patienten och använd alltid de medföljande bälten för patienten.
6. Följ alltid bra lyftförfaranden och ergonomiska riktlinjer.
7. Följ vanliga akuta patienthanteringsrutiner när du använder stolen.
8. Medicinsk rådgivning går utöver parametrarna för manualen. Det är användarens ansvar att säkerställa säkra metoder för både sig själva och patienten.

VARNING

Felaktig användning kan orsaka personsador! Använd stolen endast för det ändamål som beskrivs i denna manual.

5.2. Flytta stolen

- Placera patienten på stolen med hjälp av lokala rutiner för patienthantering. Se till att patienten sitter med ryggen helt mot bakpanelen och att huvudet sitter ordentligt mot huvudstödet (se sidan 6 för montering av huvudstöd) innan du använder det.
- Bälten måste spännas fast innan stolen flyttas.
- När du flyttar patienter ska du alltid informera dem om vad du ska göra.

5.3. Använda stolen på plan mark

- Innan du rullar stolen på plan mark justerar operatören vid huvudänden det övre handtaget till önskat läge för bekväm användning. (Bakre låsande lyft-handtag är endast avsett för transport över trappor, inte för stolsvängning på plan mark).
- Informera patienten så att de är medvetna om vad som händer.
- Stolen har totalt fyra hjul. Detta underlättar förflyttning på plan mark och innebär att stolen kan användas utan att tippas bakåt.
- Operatören vid stolens fotände hjälper till vid behov med hinder som dörrkarmar eller ojämna ytor. Det nedre handtaget kan användas för att komma över större hinder.




5.4. Använda stolen ner för trappa

- Det rekommenderas starkt att följande procedurer först tränas med en stol laddad med träningsdocka i utbildningssyfte.
- Att använda stolen i trappan kräver minst två operatörer. Använd ytterligare hjälp efter behov för att kontrollera stolen säkert.
- Det rekommenderas att de två operatörerna tittar på varandra när de transporterar en patient nerför trappan. Om det är tillgängligt bör en tredje person hjälpa till med att fungera som en guide vid fotänden.
- Se till att vägen nerför trappan är fri från hinder som kan påverka operatörernas säkerhet eller larvfötternas funktion (se sidan 10).



1. **Huvudoperatör** - dra ut det övre handtaget helt och se till att det är låst. (se sidan 9).
2. **Huvudoperatör** - fäller ut larvfötterna och ser till att de är låsta (se sidan 11).
3. **Vid fotänden** - tar ställning i trappan vänd mot stolen och griper tag i det nedre teleskopiska handtaget.
4. **Båda operatörerna** - arbeta tillsammans, styr stolen över kanten eller det översta steget, så att larvfötterna smidigt glider över trappsteget.
5. **Båda operatörerna** - låt stolen långsamt glida nedåt tills larvfötterna vilar på de översta två eller tre trappstegen.

Detta fastställer glidvinkeln. Se till att båda operatörer är bekväma innan du fortsätter.

|  VARNING |
|---|
| Innan du placerar patienten på stolen ska du alltid se till att stolen är helt utfälld. |
| Undvik snabb omställning av handtagen på stolen eftersom det kan leda till patientskada. Stöd stolen medan du justerar handtagen. |
| lämna aldrig en patient utan uppsikt i stolen och använd alltid bälten. |



6. För att bibehålla glidvinkeln -

- **Huvudoperatör** - applicerar lätt tryck nedåt på det utdragna övre handtaget.
- **Vid fotänden** - applicerar lätt press uppåt på lyfthandtagen i fotänden.

7. **Båda operatörerna** - när stolen når botten av trappan och bakhjulen är på golvet släpper handtagen vid fotänden, huvudoperatören tippar stolen framåt tills alla fyra hjulen är på golvet.

8. Om detta är slutet på trappan kan huvudoperatören fälla in larvfötterna och sänka det övre handtaget till en bekväm höjd.

ATT PAUSA I TRAPPAN

För att pausa under nedstigningen, luta stolen framåt precis så att bakhjulen kan vila på trappan medan båda förarna håller stolen på plats. För att fortsätta nerför trappan, luta tillbaka stolen och återta glidvinkeln (se steg 5 ovan).

Uppför trappor: När patienten sitter fast ordentligt på stolen, justera det övre handtaget till ett läge som passar din längd. (Se avsnitt övre handtag). Det övre handtagsläget kan ändras för att ge bättre handgrepp. Justera teleskophandtagen och se till att de är i fastlåst läge. Lyft patienten upp för trappan. Informera alltid patienten om vad som händer.

6. Skötsel av FST-stolen

6.1. Desinfektion

Desinficera alla ytor på stolen inklusive huvudstöd och bälten. Följ tillverkarens anvisningar för desinfektionsmedel. Spraya eller torka av desinfektionsmedel på patientens bälten. Sänk inte ner det i desinfektionsmedel.


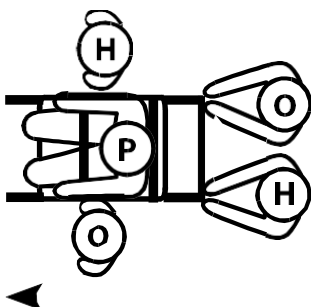

6.2. Rengöring







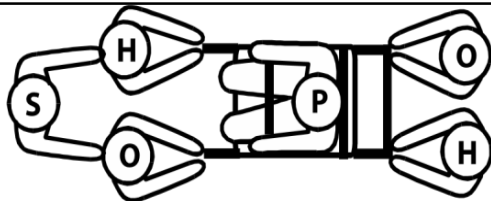
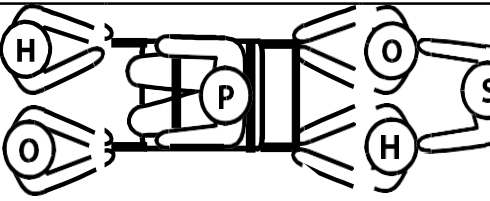
Rengör stolen och dess komponenter med en ren trasa eller mjuk borste och varmt tvålatten. Skölj med varmt vatten och lufttorka. Rengör inte med produkter som innehåller blekmedel eller fenol. En hård borste kan användas om det behövs.



7. Använda ytterligare hjälp

Att använda stolen kräver minst två utbildade operatörer. Ferno rekommenderar att man placerar en utbildad operatör i vardera änden av stolen, att operatörer och medhjälpare står mot varandra när de transporterar en patient upp eller nerför trappor och att en tredje utbildad person "ser" för den ledande operatören. Följ alla tillämpliga lokala protokoll för patienthantering med bärstolar. De utbildade operatörerna bör behålla kontrollen över stolen och manövrera kontrollerna, och den utsedda huvudoperatören bör instruera alla medhjälpare. Diagrammen nedan visar föreslagna placering för operatörer och medhjälpare.

| | | |
|---|---|--|
| Riktning | Rullande på plan yta |  VARNING Medhjälpare kan orsaka skada eller skadas. Behåll kontrollen över stolen, manövrera och instruera alla medhjälpare |
| Två operatörer och Två medhjälpare |  | |
| | |  Lastgräns 551 pund 250 kg Inspektera stolen om lastgränsen har överskridits (Se Inspektera stolen, sidan 37). |
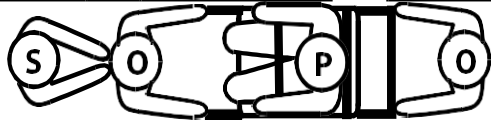
| |  NERFÖR  |  UPPFÖR  |
|---|---|---|
| Två operatörer och en medhjälpare |  |  |
| Två operatörer och tre medhjälpare |  |  |

O = Operatör H = Medhjälpare S = Övervakare P = Patient



8. Underhåll

FST-stolen kräver regelbundet underhåll. Planera och följ ditt eget underhållsschema men använd följande som ett minimum.

Mer frekvent underhåll krävs i situationer med frekvent användning. Om skador upptäcks, ta stolen ur drift tills reparation eller utbyte kan göras.

När du använder en produkt för underhåll, följ tillverkarens riktlinjer och läs tillverkarens säkerhetsdatablad.

| Action | As Needed | Each Month |
|--------------|-----------|------------|
| Disinfecting | • | |
| Cleaning | • | |
| Inspection | • | • |
| Lubrication | | • |

|  VARNING |  VARNING |
|---|--|
| Felaktigt underhåll kan orsaka skador. Underhåll endast stolen enligt beskrivningen i denna manual. | Felaktig användning kan orsaka personskador! Använd stolen endast för det ändamål som beskrivs i denna manual. |

9. Garanti och service

Standardvillkor gäller för all försäljning. En kopia finns tillgänglig på begäran. Dessa innehåller fullständiga detaljer om garantivillkoren och begränsar inte kundens lagstadgade rättigheter.

För service, underhåll och eventuella frågor angående detta eller någon annan FERNO-produkt, kontakta:

Ferno Slovakia s.r.o.

Bošáca 893, 913 07

Slovakia

Tel: + 421 (0) 32 7708010

Fax: + 421 (0) 32 7708011

eller din lokala distributör

Registrerat kontor:

FERNO Slovakia s.r.o.

Bošáca 893, 913 07, Slovakia

Tel: + 421 (0) 32 7708010


Fax: + 421 (0) 32

7708011

e-post: sales@ferno.sk

Eftersom vår policy är en kontinuerlig utveckling förbehåller sig FERNO Slovakia sro rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

CE-auktoriserad representant för Ferno Slovakia

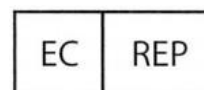

Ferno Washington Italia S.r.l.
via B. Zallone, n. 26, 40066
Pieve di Cento, Bologna, Italy
+39.051.6860028

