

S-2108 AF och S-2108 A.

ARMÉBÅR

MANUELL





Läs den här handboken och
behåll för framtida referens

TIPS: Regelbunden rengöring hjälper
till att minska risken för överföring
av sjukdomar och gör det möjligt för
utrustningen att fungera optimalt

Varning

Denna manual innehåller allmänna instruktioner för användning, drift och skötsel av denna bår. Instruktionerna är inte allomfattande. Säker och korrekt användning av denna bår är endast enligt användarens eget gottfinnande. Säkerhetsinformation ingår som en tjänst för användaren. Alla andra säkerhetsåtgärder som vidtas av användaren bör vara inom och under beaktande av gällande bestämmelser. Det rekommenderas att utbildning om korrekt användning av denna bår ges innan du använder denna bår i en verklig situation. Spara denna handbok för framtida referens. Inkludera den med båren vid överföring till nya användare. Ytterligare gratiskopior är tillgängliga på begäran från FERNO Manufacturing.

Modell S-2108-AF Produktspecifikationer

Längd - öppen	 206 cm
	 229 cm
Längd – vikt	 103 cm
	114 cm
Bredd - öppen	 55 cm
vikt	 11 cm
Höjd - öppen	 14 cm
vikt	 20 cm
Enhetsvikt	 6 kg
Lastkapacitet	 159 kg

WARNING

Otränade operatörer kan orsaka personskador eller skadas. Tillåt endast utbildad personal att använda båren.

Felaktig användning av båren kan orsaka skador. Använd båren endast för det ändamål som beskrivs i denna manual.

En oövädd patient kan skadas. Stanna hela tiden med patienten.

En osäker patient kan falla av båren och skadas. Använd bälten för att säkra patienten på båren.

En felaktigt säkrad bår kan vika sig och orsaka skador. Fäst båren ordentligt och kontrollera att spärrhakarna har låsts.

Räddningspersonal kan skada eller bli skadade. Behåll kontrollen över räddningsbåren och räddningsuppdraget.

Användare kan skadas. Visa användare var du ska ta tag i båren för att undvika klämrisk.

Felaktigt underhåll kan orsaka skador. Underhåll endast båren enligt beskrivningen i denna manual.

Felaktiga delar och service kan orsaka personskador. Använd endast Ferno-delar och Ferno-godkänd service på båren.

Att ändra båren kan orsaka personskador och skador. Använd båren endast enligt design av Ferno.

Att fästa felaktiga föremål på båren kan orsaka personskador. Använd endast Ferno-godkända föremål på båren.

Modell S-2108-A

Produktspecifikationer

Längd	 206 cm
	 229 cm
Bredd - öppen	 55 cm
vikt	 11 cm
Höjd	 14 cm
Enhetsvikt	 5 kg
Lastkapacitet	 159 kg

Produktnummer	produktnamn	GTIN / UDI
60-0102-005	S-2108-AF- 206 ARMÉBÅR	8588008129456
60-0102-006	S-2108-AF-229 ARMÉBÅR, (PACKAD)	8588008129463
60-0102-007	S-2108-A-206 ARMÉBÅR	8588008129470
60-0102-008	S-2108-A-229 ARMÉBÅR, (PACKAD)	8588008129487

Armébår Instruktioner

[Produktnamn] Medicinsk utrustning S-2108AF och S-2108 A Armébår

[Avsedd användning]

Modellerna S-2108 AF och S-2108 A Armébår är akuta patienthanteringsanordningar. Varje bår i serien är för professionell användning av minst två utbildade operatörer. Båren kan bäras av operatörerna. I den här manualen används den allmänna termen "bår" när funktionen delas av alla modeller i serien. Det individuella bårnamnet används när funktionerna skiljer sig åt.

[Tillämpning]

Modellerna S-2108 AF och S-2108 A-bårar är de nödbårar du väljer för: Militärmedicin, Idrottsanläggningar, Första hjälpen, EMS, Friluftsräddning, Skidpatruller, Outdoor Adventures, Industriräddning, Veterinärvård med mera.

[Användarinstruktioner]

Vik upp baren / Vik ihop bärarna - på motsatt sätt



[Rengöring och desinfektion]

Torka av alla ytor med desinfektionsmedel. Följ tillverkarens anvisningar för desinfektionsmedel för appliceringsmetod och kontakttid. Ferno rekommenderar att du inspekterar baren för skador när du desinficerar den.

[Inspektera baren]

Låt er underhållspersonal inspektera baren regelbundet.

Om inspektionen visar skador eller överdrivet slitage, ta baren ur drift tills reparation är genomförd.

[Delar och service]

För att beställa Ferno-delar och för professionell bårreparation, kontakta FERNO eller din Ferno-distributör. Din distributör är den enda agent som auktoriserats av Ferno för att hantera, service och reparera Ferno-produkter.

Ferno Slovakia Kontakt:

Ferno Slovakia s.r.o. Bošáca 893

913 07 Slovakia

Tel: + 421 (0) 32 7708010

Fax: + 421 (0) 32 7708011

[Förvaring]

Undvik hög temperatur och fukt

[Samsvarserklæring]

Modellerna S-2108 AF och S-2108 A Armébår nevnt i denne håndboken ble designet, produsert og testet for å oppfylle spesifikasjonene i EN 1789 og EN 1865 standarder.



Användarmanual



Används av utbildad personal.



Ferno Washingtomb Italia Srl
via B.Zallone, n26, 40066
Pieve di Cento,
Bologna, Italien
+39.051.6860028

Datum: August, 2021

Version: 06



Ferno Slovakia s.r.o.

913 07 Bosaca 893 Slovak Republic
Tel: + 421 (0) 32 7708 010, sales@ferno.sk
Fax: + 421 (0) 32 7708 011