

S-240E, S-242E stol

40-E, 42-E stol

MANUELL BÄRSTOL



Ferno Slovakia s.r.o.

913 07 Bosaca 893 Slovak Republic

Tel: + 421 (0) 32 7708 010, sales@fermo.sk

Fax: + 421 (0) 32 7708 011



Läs den här handboken och
behåll för framtida referens

TIPS: Regelbunden rengöring hjälper
till att minska risken för överföring
av sjukdom och gör att utrustningen
kan fungera optimalt

Varning

Denna handbok innehåller allmänna instruktioner för användning, drift och skötsel av denna stol. Instruktionerna är inte allomfattande. Säker och korrekt användning av den här stolen är endast användarens eget gottfinnande. Säkerhetsinformation ingår som en tjänst för användaren. Alla andra säkerhetsåtgärder som vidtas av användaren bör vara inom och under beaktande av gällande bestämmelser. Vi rekommenderar att du får utbildning i korrekt användning av stolen innan du använder stolen i en verklig situation. Spara den här handboken för framtida referens. Inkludera den med stolen vid överföring till nya användare. Ytterligare gratiskopior är tillgängliga på begäran från FERNO Manufacturing.

Modell S-242 E Stol Produktspecifikationer

Djup öppet 74 cm
vikt 17 cm
Bredd 53 cm
Höjd 92 cm
Enhetsvikt 11,6 kg
Lastkapacitet 159 kg

WARNING

Otränade operatörer kan orsaka personskador eller skadas. Tillåt endast utbildad personal att använda stolen.

Felaktig användning av stolen kan orsaka skador. Använd stolen endast för det ändamål som beskrivs i denna manual.

En oövädd patient kan skadas. Stanna hela tiden med patienten.

En osäkrad patient kan falla av stolen och skadas. Använd bälten för att säkra patienten på stolen.

Räddningspersonal kan skada eller bli skadade. Behåll kontrollen över stolen och räddningsuppdraget.

Användare kan skadas. Visa användare var du ska ta tag i stolen för att undvika klämrisk.

Felaktigt underhåll kan orsaka skador. Underhåll endast stolen enligt beskrivningen i denna manual.

Felaktiga delar och service kan orsaka personskador. Använd endast Ferno-delar och Ferno-godkänd service på stolen.

Att ändra stolen kan orsaka personskador och skador. Använd stolen endast enligt design av Ferno.

Att fästa felaktiga föremål på stolen kan orsaka personskador. Använd endast Ferno-godkända föremål på stolen.

Produktnummer	Produktnamn	GTIN / UDI
60-0110-009	STOL S-240E ORANGE (FÖRPACKAD)	8588008129708
60-0110-010	STOL S-242E ORANGE (FÖRPACKAD)	8588008129715
60-0110-013	STOL 40-E (FÖRPACKAD)	8588008129722
60-0110-014	STOL 42-E (FÖRPACKAD)	8588008129739

S-240E, S-242E, 40-E, 42-E Instruktioner för stolar

[Produktnamn] Medicinsk utrustning S-240E, S-242E, 40-E, 42-E stol

[Avsedd användning]


Model S-240E, S-242E, 40-E, 42-E Chair är en akut patienthanteringsanordning. Varje stol i serien är avsedd för professionellt bruk av minst två utbildade operatörer. Stolen kan bäras av operatörerna. I den här handboken används den allmänna termen "stol" när funktionen delas av alla modeller i serien. Det individuella stolnamnet används när funktionerna skiljer sig åt.

[Tillämpning]

Model S-240E, S-242E, 40-E, 42-E Chair är en bärstol som används för: Militärmedicin, Idrottsanläggningar, Första hjälpen, Ambulansen, Wilderness Rescue, Skidpatruller, Outdoor Adventures, Industrier, Veterinärer med mera.

[Användarinstruktioner]

Vika och fälla ut stolen.

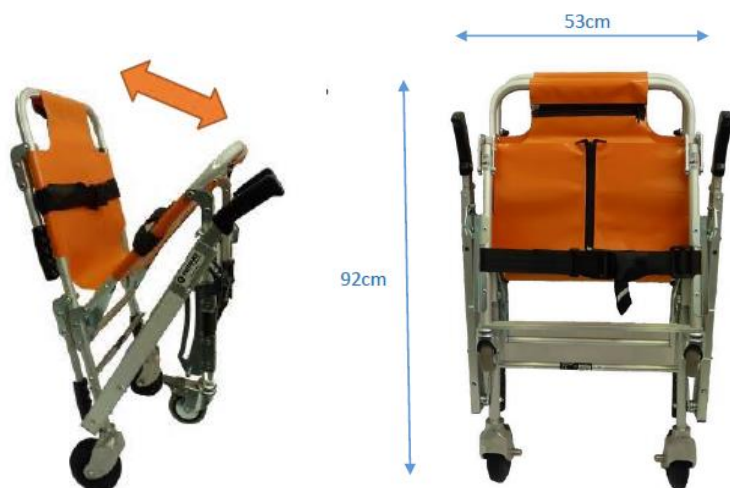

[Rengöring och desinfektion]

Torka av alla ytor med desinfektionsmedel. Följ tillverkarens anvisningar för desinfektionsmedel för appliceringsmetod och kontakttid. Ferno rekommenderar att du inspekterar stolen för skador när du desinficerar den.

[Inspektera stolen]

Låt er underhållspersonal inspektera stolen regelbundet.

Om inspektionen visar skador eller överdrivet slitage, ta stolen ur drift tills reparationen är genomförd.

[Delar och service]

För att beställa Ferno-delar och för professionell stolreparation, kontakta FERNO eller din Ferno-distributör. Din distributör är den enda agent som auktoriserats av Ferno för att hantera, service och reparera Ferno-produkter.

Ferno Slovakien Kontakt:

Ferno Slovakien s.r.o.

Bošáca 893

913 07 Slovakien

Tel: + 421 (0) 32 7708010

Fax: + 421 (0) 32 7708011

[Förvaring]

Undvik hög temperatur och fukt

[Försäkran om överensstämmelse]

Modell S-240E, S-242E, 40-E, 42-E stol som nämns i den här handboken är designad, tillverkad och testad för att uppfylla specifikationerna i EN 1789 och EN 1865 standarder.

[Samsvarserklæring]

Modell S-240E, S-242E, 40-E, 42-E stol nevnt i denne håndboken ble designet, produsert og testet for å oppfylle spesifikasjonene i EN 1789 og EN 1865 standarder.



Varning

Används av utbildad personal.



Ferno Washingtomi Italia Srl
via B.Zallone, n26, 40066
Pieve di Cento,
Bologna, Italien
+39.051.6860028

