

Modell S-265 Scoop

Modell S-265 Scoop Stretcher (bår) är en akut patienthanteringsanordning. Den är utformad för att hjälpa till med att flytta en patient när utrymmet är begränsat eller när patienten behöver flyttas med liten förändring av kroppsläget. Använd bårn enligt riktlinjer och protokoll i det land där den används. Rådgör med medicinskt ansvariga för information om riktlinjer och protokoll, innan du använder bårn med en patient.

Bårn är avsedd för professionellt bruk av minst två utbildade operatörer.



Bårramen är konstruerad i två halvor som går att ta loss, skjut in under patienten och koppla sedan ihop igen och lås för att lyfta patienten. Bårn kan också användas i "V"-form när den endast öppnas i fotänden innan man lastar patienten.

Andra funktioner inkluderar en teleskopisk fotdel med låsning positioner för längdjustering, tre handtag på vardera sidan av huvudramen och dolda gångjärn som gör att bårn kan fällas för förvaring.

Bårn Model S-265 är utrustad med en uppsättning av tre patientbegränsningar.



Läs den här handboken och behåll för framtida referens



August 2021, ver. 08

Pub. Nr 50-8112-001_08



Tillverkare:

Ferno Slovakia s.r.o.

913 07 Bosaca 893 Slovakia



Tel: +421 (0) 32 7708010, sales@ferno.sk

1. Justera bår längd

Justera bårens längd till patientens höjd innan du lossar halvorna. Detta säkerställer lika justering av båda halvorna.

ATT FÖRLÄNGA ELLER KORTA BÅREN

1. Flytta låsspaken på vardera sidan av ramen till olåst läge (Figur 1) **Obs!** När bårer ligger uppåt på en plan yta är den låsta positionen "nedåt" och den upplåsta positionen är "upp" (Figur 1)
2. Dra nedre bårdelen utåt till önskad längd och stoppa nära ett av låspositionerna vid hålen längs fotavsnittets ram
3. Sätt tillbaka båda låsspakarna till låst läge (Figur 1)
4. Skjut eller dra lite i fotdelen tills den låses på plats i befintliga hål
5. Se till att båda sidor är ordentligt låsta

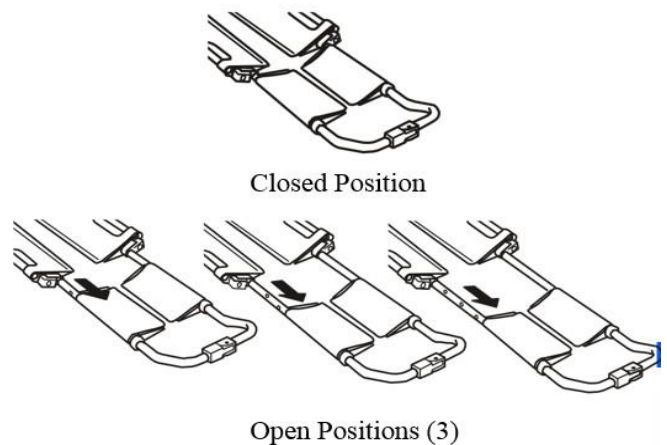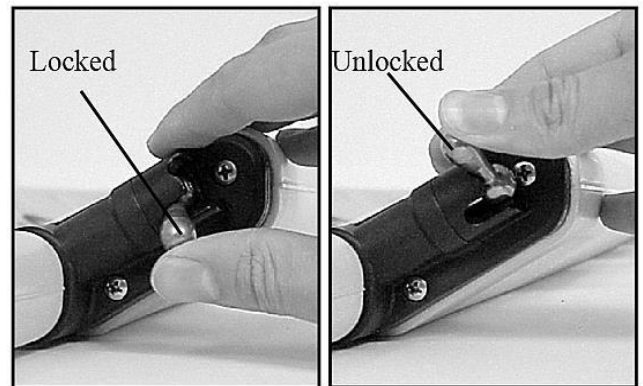



2. Användarinstruktioner

För att separera bårhalvorna, använd tummarna för att trycka på Twin Safety Lock-spakarna på varje ändkoppling och dra kopplingshalvorna ifrån varandra.



Två säkerhetslåsspakar

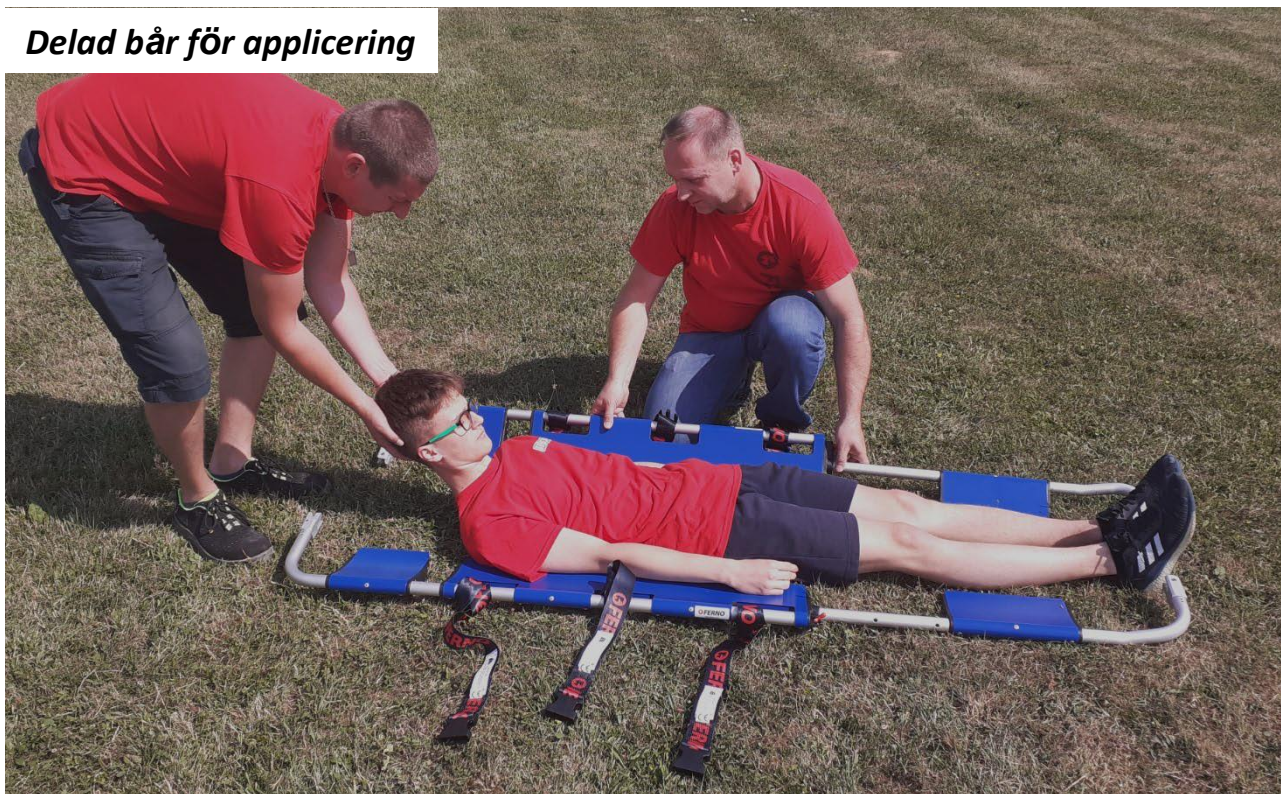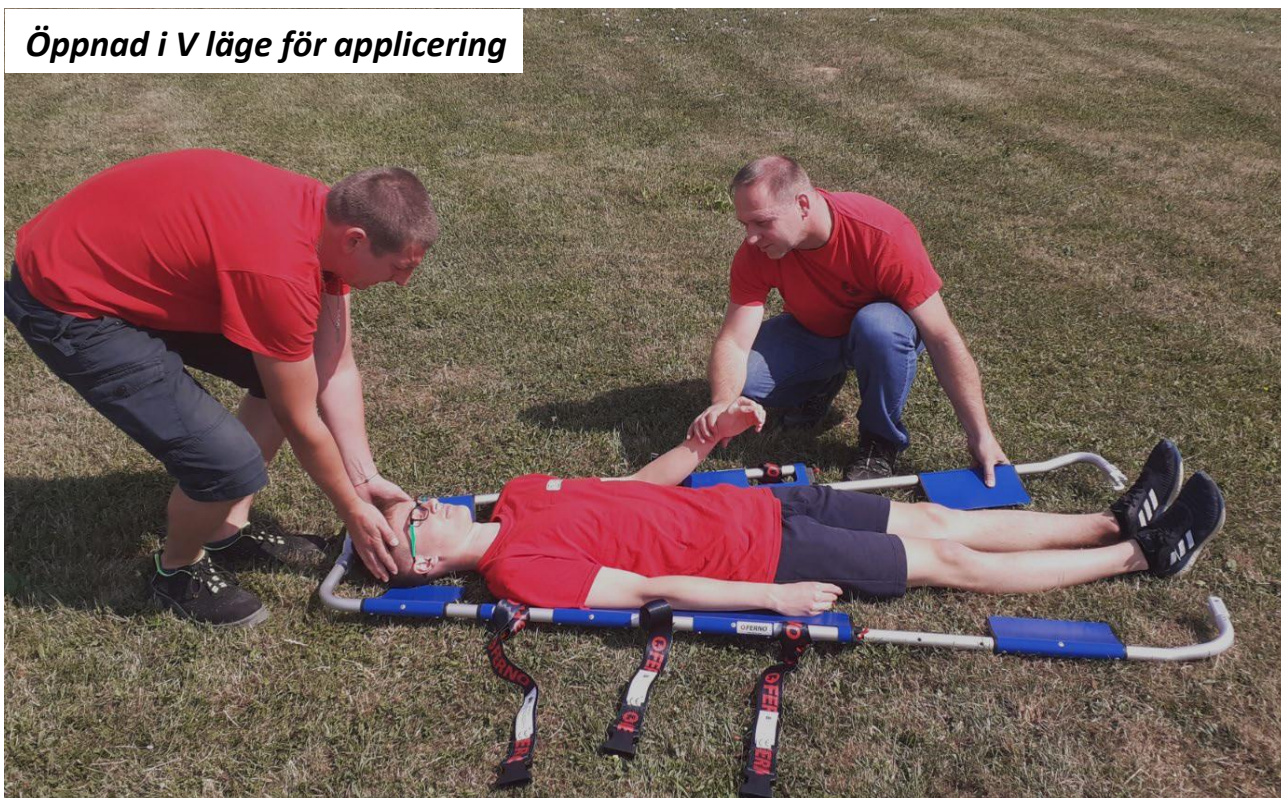

Delad bår för applicering**Öppnad i V läge för applicering**

Bära båren carryingstretcher



3. ANVÄNDA båren i "V" läge

Vik upp båren om den är vikt för förvaring och justera längden (se B Justera bår längd)

1. Lossa bälten (om de förvaras på båren)
2. Öppna endast fotkopplingen.
3. Dra isär bårens halvor i fotänden för att bilda en "V" -form.
4. Placera båren med patientens huvud vid basen av „V“ (Figur 6)
5. Använd lokala riltlinjer för att arbeta båren inåt och under patienten. Arbeta ifrån huvud till fot tills kopplingshalvorna vid fotänden möts.


För att undvika att klämma eller dra i patientens hud, hår eller kläder ska du vara försiktig när du sätter bårhalvorna på plats under patienten.

4. FÄSTA BEGRÄNSNINGAR


Model S-265 Scoop Stretcher innehåller en uppsättning av tre tvådelade bälten.

Så här fäster du ett tvådelat bälte:

1. Lås upp spännet och separera den i två delar.
2. För den öglade änden av bältet uppåt genom en handtagshål på bår ramen.
3. Håll öglan öppen och trä spännet genom öglan
4. Dra bältet genom öglan tills öglan sitter tätt mot bår ramen.
5. Kontrollera att alla bälten är ordentligt fastsatta.

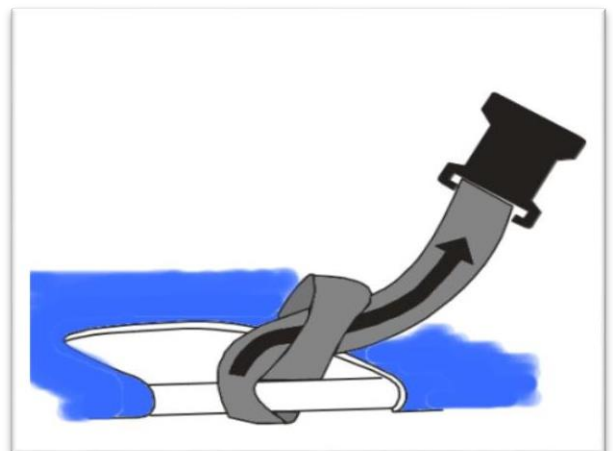

5. ANVÄNDA YTTERLIGARE HJÄLP

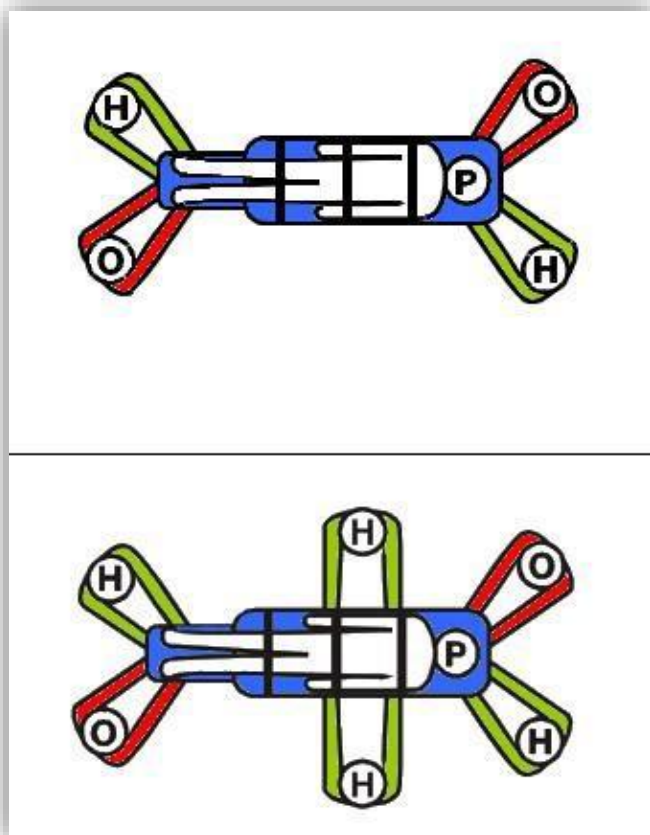



O-operator H-extra hjälp
P-Patient

7. BÄRKOMPONENTER

6. LAGRING AV BÅREN

Vik ihop båren om den ska vara vikt för förvaring.

1. Lås upp låsspaken på båda sidor av båren.
2. För ut fotdelen helt genom att dra ut den tills gångjärnen är helt synliga.
3. Lyft fotsektionen och fäll den över på torsopanelen.

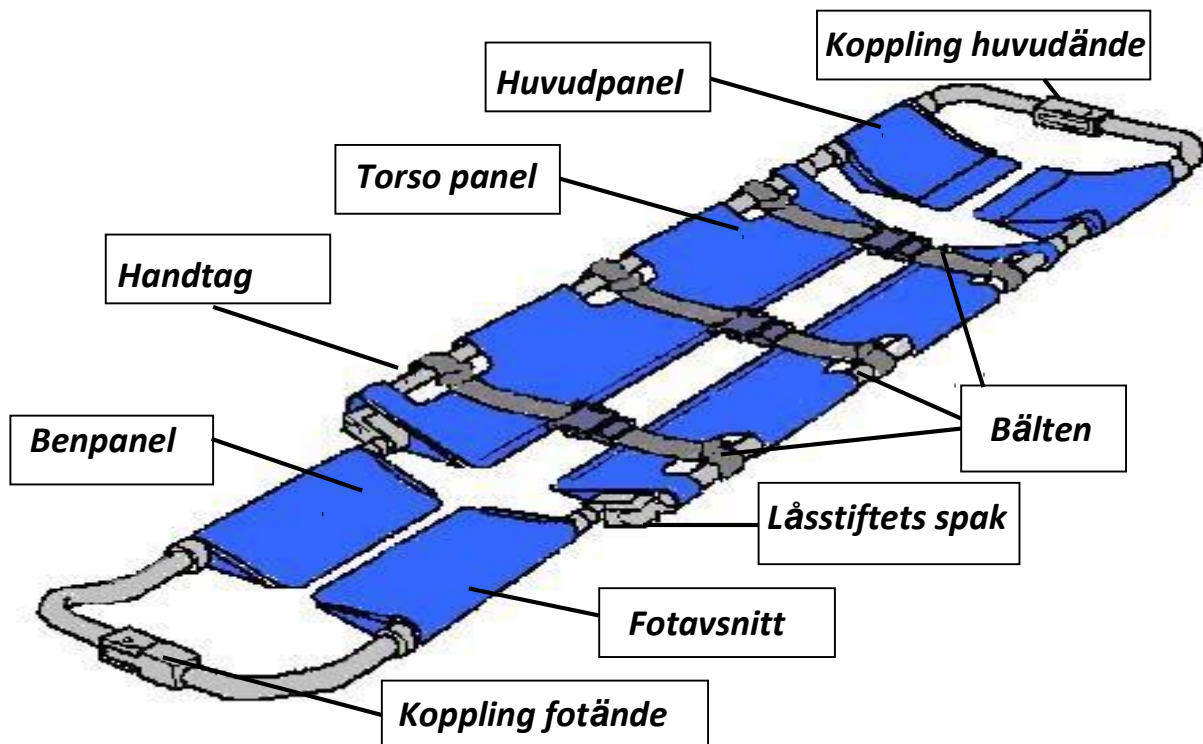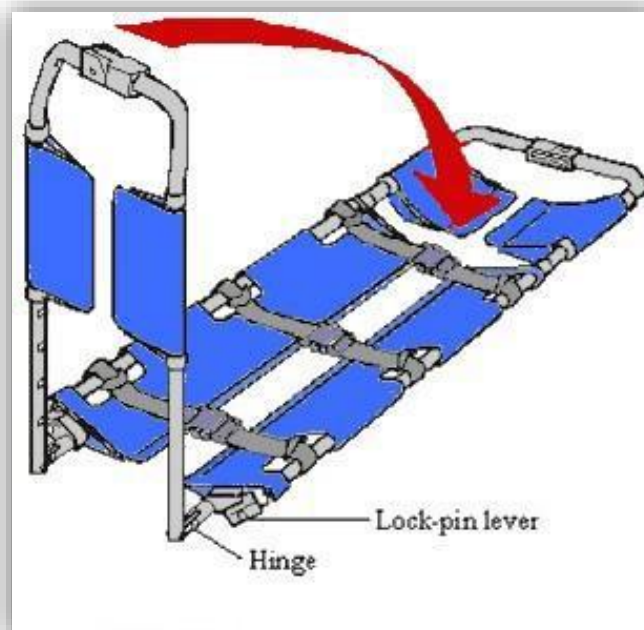

8. Smörjning av bårén

- vitt litiumfett
- SAE 30-vikt olja
- Teflonsmörjmedel med torr beläggning




8. Garanti och service

Standardvillkor gäller för all försäljning. En kopia finns tillgänglig på begäran. Dessa innehåller fullständiga uppgifter om teckningsoptionsvillkor och begränsar inte kundens lagstadgade rättigheter.

Kontakta din lokala distributör för service, underhåll och eventuella frågor angående detta eller andra produkter.

CE-märket på denna produkt visar överensstämmelse med kraven i direktiv Bilaga IV + bilaga VIII till MDR 2017/745 för medicintekniska produkter. Enheten uppfyller kraven EN 1865-1.

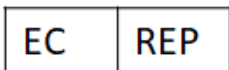

Ferno Washington Italia Srl via
B.Zallone, n26, 40066 Pieve di
Cento, Bologna, Italien
+39.051.6860028

! VARNING
FÖR SERVICE OCH REPARATION Vänligen hänvisa till din försäljningsagent
Felaktig användning av bårén kan orsaka personskador. Använd bårén endast för det ändamål som beskrivs i denna manual.
Otränade operatörer kan orsaka personskador eller skadas. Tillåt endast utbildad personal att använda bårén.
Felaktig användning kan orsaka personskador. Använd endast bårén enligt vad som visas i denna manual.
En oövervakad patient kan skadas. Stanna hela tiden med patienten.
En osäkrad patient kan falla av bårén och skadas. Använd bälten för att säkra patienten i bårén.
Otränade hjälpare kan orsaka skada eller skadas. Manövrera och upprätthålla kontroll över bårén och rikta eventuella hjälpare.