



Användarinstruktion

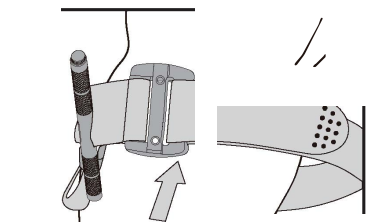


ENHANDS APPLICERING

Trä remmen i en ögla över den skadade extremiteten och positionera tourniqueten 5-8cm ovan blödningen direkt mot huden.

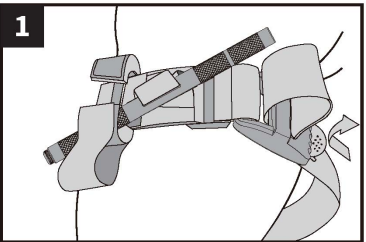


TVÅHANDS APPLICERING


Lägg bandet runt den skadade extremiteten och trä änden på remmen genom plastspännet. Positionera tourniqueten 5-8cm ovan blödningen direkt mot huden.

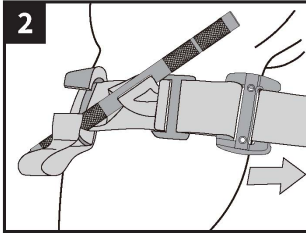


Remmen skall alltid passera genom spännet och dess tandade kant. Dra åt remmen ordentligt och fäst den mot sig själv hela vägen runt extremiteten men inte över klykan där lappen märkt TIME sitter. Remmen skall dras åt så hårt att 3 fingrar inte kan tryckas in under den. Sitter den för löst måste den sträckas hårdare och fästas på nytt.

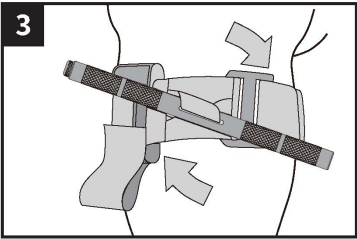

Vrid runt spännpinnen tills blödningen är stoppad. Kontrollera också att det inte finns puls nedanför tourniqueten. Pulsen distalt skall upphöra när den är korrekt applicerad.

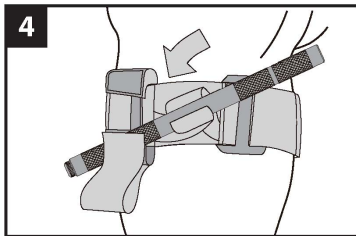


Säkra spännpinnen i klykan så att den inte kan lossna. Kontrollera att blödning och distal puls har upphört. Överväg att spänna ytterligare eller applicera en andra tourniquet ovanför den första. Utvärdera resultatet.

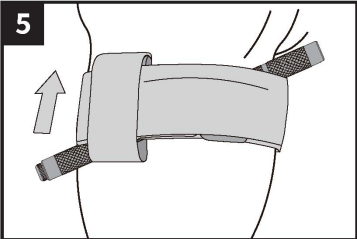

Placera remmen genom klykan och över spännpinnen. Säkra remmen och spännpinnen genom att dra TIME-lappen runt remmen. Notera med pennan i spännpinnen tidpunkten för applicering. Överväg om det krävs ytterligare säkring av förbandet med tejp. Säkerställ att tourniqueten är synlig så att den inte kan förbises av sjukvårdspersonal.




FÖRVARING AV TOURNIQUET I QUICK LAUNCH KONFIGURATION

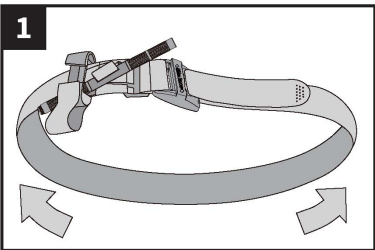


Trä remmens ände genom spännet. Dra igenom ca 20cm av remmen , vik den tillbaka och fäst den vid sig själv.



Platta ut slingan som formats av remmen. Placera spännet i mitten av den utplattade remmen.

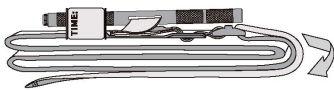


Vik tourniqueten på mitten så att spännet hamnar i ena änden. Säkerställ att lappen märkt TIME är fri och klar att användas såsom visas på bilden.

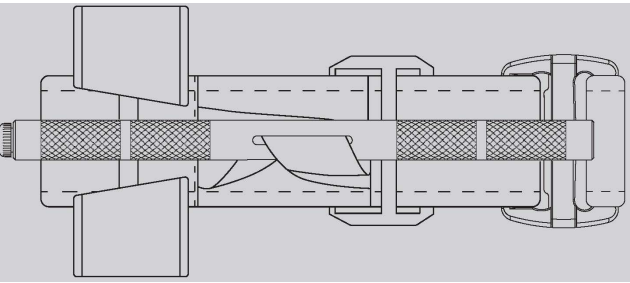

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands
Tel: +31(0)10 3034500; +31(0)2021 11106 E-mail: ec.rep@sungogroup.com



WUXI EMSRUN TECHNOLOGY CO.,LTD
No.100 Fengbin Road, Wuxi City, Jiangsu Province, 214000, P.R.Of China.

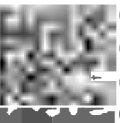

(01) 06974567740331
(11) 241115
(10) 241115
(17) 291114

[LOT] 20241115

[WAVE] 20241115

[SAND] 20291114

[LOT] Lot Number

[WAVE] Date of Manufacture

[SAND] Expiration date

[FAB] Manufacture



Authorized representative in the European Community/European Union



Do not re-use



Medical device

Manufactured for/Importer: ViTri Medical AB, Sweden. www.vitri.se



Only to be used by persons with appropriate training.
För användning endast av personer med lämplig utbildning.